

\*2017年10月第(4版)新規記載要領に基づく改定  
2006年4月21日作成(第3版)  
2006年3月14日作成(第2版)  
2003年1月10日作成(新様式第1版)

医療機器届出番号: 27B3X00094Y07002

歯科材料7 歯科用ワックス  
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス(16189000)

## トールワックス

### 【形状・構造及び原理等】

1) 成分

天然蜜蝋

2) 形状

スカルプチャー、インナーアンダーライン、サービカルマー  
ジン、ミリングワックス モスグリーン、ダークグレー

70g 及び 8g

### 【使用目的又は効果】

・ロストワックス法に用いるキャスティングワックスでインレ  
ー、クラウン、ブリッジ等のワックスアップに用いる。

### 【使用方法等】

- 1) 加熱されたインストルメントで、少量ずつ分離材が塗布さ  
れた石膏模型に盛り上げていく。
- 2) 過不足部分を盛り足したり、削ったりしてクラウン、ブ  
リッジ等を完成します。
- 3) 埋没は、通常方法に従い作業してください。

### 【使用上の注意】

1) 使用上の注意

- ①本材は可燃性なので、使用の際、火傷をしないよう注意  
する事。
- ②使用及び保管場所には、消火装置を備える事。
- ③本材は説明書に記載の用途以外には使用しない事。
- ④本材は歯科医療有資格者以外は使用しない事。

2) 重要な基本的注意

- ①本材の使用により発疹、湿疹、発赤、腫瘍、かゆみ、か  
ぶれ等の過敏反応が現れた術者は、直ちに使用を中止し、  
専門医の診断を受ける事。

### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・室温保管
- ・本材は高温となる場所(ストーブの側、直射日光の当たる場  
所など)に保管しない事。
- ・本材は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管  
しない事。
- ・本材は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理  
する事。

[使用期限]

- ・使用期限は商品に明記しています。

### 【保守・点検に係わる事項】

- ・不純物が入っていないか確認する事。

### 【製造販売業者又は製造業者等の氏名又は名称等】

製造販売業者: 内外歯材株式会社  
住所: 〒543-0062  
大阪府大阪市天王寺区逢阪 2-3-10  
電話番号: 06-6771-5553  
FAX番号: 06-6779-7518  
  
外国製造所: YETI DENTAL 社  
国名: ドイツ