

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス (16189000)

ワックス ジャイアント

【形状・構造及び原理等】

- 1) 成分
天然蜜蝋
- 2) 形状

種類	色	容量
シングルライン	グレー	75 g・8 g
	サンド	75 g・8 g
	ブルー	75 g・8 g
	レッド (サービカル マージン)	75 g・8 g
ダブルライン	グレー	75 g
	サンド	75 g
	ブルー	75 g

【製造販売業者又は製造業者等の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 内外歯材株式会社
住所 : 〒543-0062
大阪府大阪市天王寺区逢阪 2-3-10
電話番号 : 06-6771-5553
FAX 番号 : 06-6779-7518

外国製造所 : YETI DENTAL 社
国名 : ドイツ

【使用目的又は効果】

- ・ロストワックス法に用いるキャスティングワックスでインレー、クラウン、ブリッジ等のワックスアップに用いる。

【使用方法等】

- 1) 加熱されたインストルメントで、少量ずつ分離材が塗布された石膏模型に盛り上げていく。
- 2) 過不足部分を盛り足ししたり、削ったりしてクラウン、ブリッジ等を完成します。
- 3) 埋没は、通常方法に従い作業してください。

【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
 - ①本材は可燃性なので、使用の際、火傷をしないよう注意する事。
 - ②使用及び保管場所には、消火装置を備える事。
 - ③本材は説明書に記載の用途以外には使用しない事。
 - ④本材は歯科医療有資格者以外は使用しない事。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①本材の使用により発疹、湿疹、発赤、腫瘍、かゆみ、かぶれ等の過敏反応が現れた術者は、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受ける事。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・室温保管
- ・本材は高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に保管しない事。
- ・本材は火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しない事。
- ・本材は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理する事。

[使用期限]

- ・使用期限は商品に明記しています。

【保守・点検に係わる事項】

- ・不純物が入っていないか確認する事。