

*2017 年 10 月（第 3 版）新規記載要領に基づく改定
2006 年 7 月 10 日作成（第 2 版）
2003 年 1 月 10 日作成（新様式第 1 版）

医療機器届出番号：27B3X00094Y09002

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材（70907000）

ダイヤグレーズ（ダイヤモンドハードペースト）

【形状・構造及び原理等】

- 成分
酸化アルミ、ダイヤモンド粒子
- 形状
5g

【使用目的又は効果】

- 研磨材で主にポーセレンやハイブリットセラミック、硬質レジン、コンポジットレジンの艶出し研磨に用いる。

【使用方法等】

- 本材をバフ、ブラシ等に付け、回転させながら研磨対象物に接触させ、使用回転数 7,500rpm 以下で使用する。

【使用上の注意】

- 使用上の注意
 - 使用前、使用後に点検を行い、汚染がある場合は除去すること。
 - 整備点検された歯科用、及び歯科技工用回転駆動装置の内、回転数を指定回転数値以下で安定して使用できるものを回転駆動力とすること。
 - ブラシ、バフ等を使用する場合には、その説明書に表示してある使用上の注意事項を守ること。
 - 歯科用マンドレールを使用する際、その説明書に表示してある使用上の注意事項を守り、使用する機械製造業者の指定に従って軸ぶれ緩みのないように軸の 2/3 以上確実にチャッキングさせること。
 - マンドレールが折れ曲がったりすることがあるので無理な角度、過度の加圧での使用はさけること。
 - 軸部の損傷、変形等がある場合、使用を中止すること。
 - 指定の回転数を超えて使用しないこと。
 - 本材は記載の用途以外には使用しないこと。
 - 本材は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 重要な基本的注意
 - 目の損傷を防ぐ為に、保護眼鏡等を使用すること。
 - 万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。
 - 本材及び、切粉の飛散に備え保護カバー、集塵等をして周囲の安全を確保し、粉塵による人体への影響を避けるため、公的機関が許可した防塵マスクなどを使用し、集塵を吸入しないこと。
 - 本材使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、かゆみ、痺れ等の過敏症が現れたら使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 湿気、腐食性薬剤及びその蒸気を避けること。
- 外圧（物理的負荷）及び汚染を避けること。
- 本材は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【保守・点検に係わる事項】

- 不純物が入っていないか確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 内外歯材株式会社
住所： 〒543-0062
大阪府大阪市天王寺区逢阪 2-3-10
電話番号： 06-6771-5553
FAX 番号： 06-6779-7518
外国製造所： YETI DENTAL 社
国名： ドイツ