

類別：機械器具（25）医療用鏡
一般医療機器：双眼ルーペ JMDN32692000

ナイツ双眼ルーペ TTL

【禁忌・禁止】


- (1) 本器を滅菌しないこと。[変形や破損する可能性があるため。]
- (2) 検者の危険防止のため、本器を使用中に太陽光や強い光源を直接見てはならない。

【形状・構造及び原理等】


1. 構成

- (1) ルーペ本体 1
- (2) ストラップ 1
- (3) レンズクロス 1
- (4) ケース 1

＜形状 寸法・質量＞

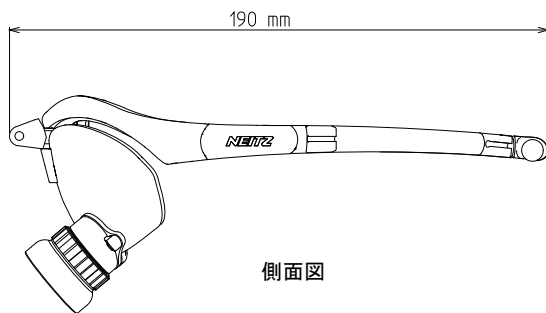

側面図

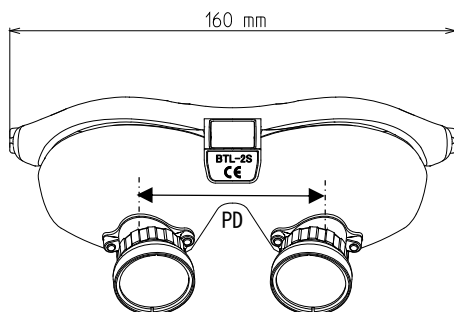

正面図

質量：約 95 g

型式	瞳孔間距離 (PD)
BTL-2S	62 mm
BTL-2N	56 mm

2. 仕様

- (1) 倍率 : 2.0 倍 - 2.5 倍
- (2) 視野径 : $\phi 113$ mm - $\phi 58$ mm
- (3) 観察距離 : 550 mm - 350 mm
- (4) 瞳孔間距離 : 上表による
- (5) 使用時温度 : 10 °C - 35 °C

3. 作動・動作原理

対物レンズから入射してきた光線は、接眼レンズを通り検者眼に到達する。双眼であるため立体視できる。

【使用目的又は効果】

小型望遠鏡として機能し、作業野の拡大像が得られる。

【使用方法等】

＜使用方法＞

- (1) ルーペ本体をメガネのように眼前に装着する。このときにフレームを額、鼻、耳にフィットさせる。
 - (2) 鏡筒先端部を左に回転すると観察距離が長くなり、右に回転すると短くなる。
 - (3) 最初に片眼ずつ鏡筒先端部を操作してピントを調整する。
 - (4) 次に両眼で観察し、左右のピントを微調整する。
- 詳細については、附属の取扱説明書を参照のこと。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- (1) 保管時温度：-10 °C～55 °C
- (2) 直射日光や多湿環境下では保管しないこと。

＜耐用期間＞

本器の耐用期間は、附属の取扱説明書に基づく使用で 8 年間とする。[自己認証（当社データ）による]

【保守・点検に係る事項】

＜清拭・消毒の方法＞

本器が汚れた場合、取扱説明書に記載の手順にしたがって清拭や消毒をすること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名称：株式会社ナイツ

取扱説明書を必ず参照してください。