

ELPS 用ガイド管

【警告】

- 本製品は取扱いに注意し、衝撃を加えたり、鋭角に曲げる様なことはしないこと。表面に少しでもキズがある場合、表面処理が剥れている可能性があるため使用を中止してください。
 [人体への影響および製品の劣化・破損の原因になります]
- 本製品は、未滅菌品です。使用には必ず洗浄・滅菌を行なうこと。組合せ製品に関しては必ず分解して洗浄・滅菌を行うこと。
 [洗浄・滅菌効果が損なわれ、尚且つ破損の原因となります]
- 製品の使用にあたっては、使用上の性能・性質をご理解の上、不適当な目的に使用しないこと。
 [人体への影響および製品の劣化・破損の原因になります]
- 樹脂類ほどの滅菌方法においても、使用方法／使用頻度／使用薬液等で必ず劣化が起こります。

【禁忌・禁止】


- 本製品の加工、改造等は絶対行わないこと。製品に衝撃を加えたり、必要以上の力で無理な変形をさせたり、振動・加工・打刻等の二次加工は行わないこと。
 [製品を著しく劣化・消耗させ、故障・破損の原因になります]
- 洗浄前の一次消毒は行わないこと。
 [付着物の変性固着により洗浄・滅菌効果が損なわれます]
- 酸・アルカリ・塩素系の強い洗浄剤および消毒液は使用しないこと。
 [製品の劣化・腐食を促進させることになります]
- 超音波洗浄は行わないこと。[剥離・破損する可能性があります]
- 磨き粉や金属ウール等での器具の表面を磨くことはしないこと。
 [製品表面のキズ・損傷・腐食の原因になります]
- 洗浄後、水・蒸留水等のついた状態で長時間放置しないこと。
 [製品表面の腐食・変色・シミの原因になります]
- ホルダー(穿刺針側)の強い締め付けは行わないこと。
 [強く締め過ぎることで誘導管内に通す穿刺針の管チューブが押えつけられ使用不能となる場合があります。]

【形状・構造及び原理等】


形状:

取付全体図

下記のように取り付けて使用する。

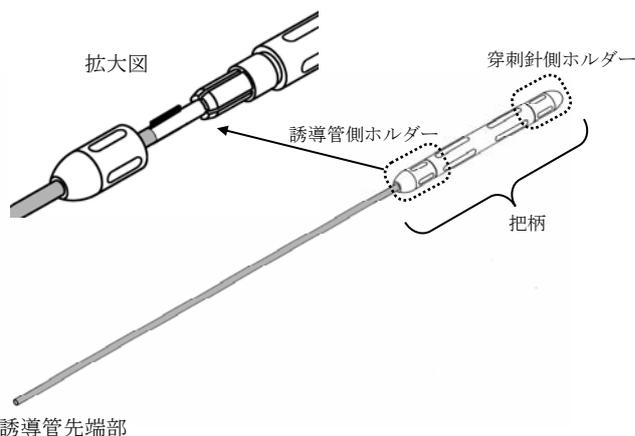

ガイド管『細』には、下図のように、2ヶ所へ Oリングが取り付けられています。

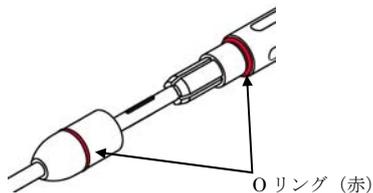


材質:誘導管…ステンレス 把柄部…ダイフロン Oリング…シリコン
 表面処理:パイプ部…テフロンコーティング

【使用目的又は効果】(*⁷)

他の器具を適正な進路に導くために用いる器具をいう。ガイドは、閉塞を切り抜ける又は体腔への挿入が困難な部位に緩徐に導入または操作するために用いる。

【使用方法等】(*⁷)

当社製品の咽喉頭直達鏡と併用して使用し、ELPS(内視鏡的咽喉頭展開術)に使用する内視鏡用穿刺針を患部まで誘導するために用いる。本製品は誘導管を固定するためのホルダーと、穿刺針を挿入し固定するためのホルダーが把柄の両端にあり、固定して使用する。誘導管を固定する際は、誘導管にある爪部分をホルダーの溝にはめ込むようにして取り付ける。(誘導管の回転防止のため)

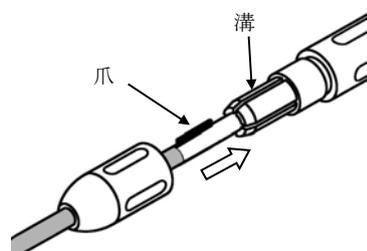

誘導管は、形状を湾曲にできるようになっており、咽喉頭直達鏡や使用状況に合わせて形状を変えて使用する。

【使用上の注意】

- 使用目的以外の目的で使用しないこと。製品の使用に際しては、手技にかなう知識・技術を必要とします。使用方法を熟知し、通常慣例として使用している医師、または医師の指導のもとでご使用ください。
- 本製品は、未滅菌品です。使用には適切な条件で必ず洗浄、滅菌をしてご使用ください。(保守・点検に係る事項参照)
- 鋼製器具は使用目的にあわせ、繊細かつ精巧に作られていますので、変形やキズをつけるなど粗雑な取扱いは製品の寿命を著しく低下させます。
- 使用後は付着した血液・体液・組織及び薬液等が乾燥する前に速やかに洗浄してください。
- 本製品は、当社製の咽喉頭直達鏡や使用状況に合わせて形状を変えて使用することができますが、その際、鋭角に曲げたり、何度も同じ部分を繰り返し曲げ伸ばししたりすると、表面処理が剥れたり、パイプ部が劣化して破損する原因となりますので、注意して形状を変更してください。
- ホルダー(穿刺針側)は、誘導管内に通す穿刺針の管チューブが動かない程度(保持レベル)に軽く回してください。

【保管方法及び有効期間等】(*⁷)

貯蔵・保管は洗浄をした後、腐食・変色・シミを防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥させること。また、滅菌済のものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染の防ぐためにも清潔な場所に保管し、有効保管期間の管理をすること。

【保守・点検に係る事項】

- 器具の取扱いについて、粗雑な扱いは避け、先端等の重要な部分に無理な力や衝撃、干渉により双方に損耗が生じないように注意してください。取扱中に破損したり、それによって思わぬケガしたりする場合がありますので十分注意してください。

- ・ 洗浄に使用する洗剤は医療用洗剤を使用してください。また、洗浄には pH が中性に近い(≒pH6～8)洗剤を使用してください。
- ・ 洗浄装置(ウォッシャー・ディスインフェクター等)を使用するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意しバケットに収納して洗浄してください。
- ・ 洗浄に使用する水は、蒸留水や脱イオン水をご使用ください。水道水は中に含まれる残留塩素及び有機物質が腐食・変色・シミの原因となります。また、洗剤の残留がないよう十分すすぎを行ってください。
- ・ 洗浄後は直ちに滅菌を行うか、または直ちに乾燥させてください。湿った状態で長時間放置すると器具表面への腐食または変色・シミの原因となります。
- ・ 滅菌前には、汚れ・損傷等が無いか点検してください。点検後、適切な条件で必ず滅菌行ってください。
- ・ 本製品は下記滅菌が可能です。組合せ製品の場合は必ず分解してから滅菌を行ってください。
 - ◇高圧蒸気滅菌
 - ◇プラズマ滅菌
 - ◇EOG 滅菌
- ・ 本状の他に別途情報提供文書等が同封されている場合にはその指示にも従ってください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】（*⁷）

製造販売業者



永島医科器械株式会社

TEL.03-3812-1271

製造業者

永島医科器械株式会社 第三工場