

機械器具 43 医療用うち うち (11947010)
一般医療機器

槌

【警告】(*¹³)


- ・ 本製品は取扱いに注意し、曲げる様なことはしないこと。
[人体への影響および製品の劣化・破損の原因になります]
- ・ 本製品は、未滅菌品です。使用には必ず洗浄・滅菌を行なうこと。
- ・ 製品の使用にあたっては、使用上の性能・性質をご理解の上、不適当な目的に使用しないこと。
[人体への影響および製品の劣化・破損の原因になります]
- ・ 樹脂及びゴム類はどの滅菌方法においても、使用方法／使用頻度／使用薬液等で必ず劣化が起こります。

【禁忌・禁止】

- ・ 本製品の加工、改造等は絶対行わないこと。製品を変形させたり、加工・打刻等の二次加工は行わないこと。
[製品を著しく劣化・消耗させ、故障・破損の原因になります]
- ・ 洗浄前の一次消毒は行わないこと。
[付着物の変性固着により洗浄・滅菌効果が損なわれます]
- ・ 酸・アルカリ・塩素系の強い洗浄剤および消毒液は使用しないこと。
また、表面がアルマイト処理されている製品(種類:東大型、ルーツェ氏)については、アルカリ性に弱いため、アルカリ性の洗浄剤及び消毒剤は使用しないこと。
[製品の劣化・腐食・表面処理劣化を促進させることになります]
- ・ 黒色に表面加工が施されている製品については、超音波洗浄は行わないこと。
[剥離する可能性があります]
- ・ 磨き粉や金属ウール等での器具の表面を磨くことはしないこと。
[製品表面のキズ・損傷・腐食の原因になります]
- ・ 洗浄後、水・蒸留水等のついた状態で長時間放置しないこと。
[製品表面の腐食・変色・シミの原因になります]

【形状・構造及び原理等】

形状:種類(東大型・ルーツェ氏・帝京大型・ヘルマン氏・鼻中隔用)

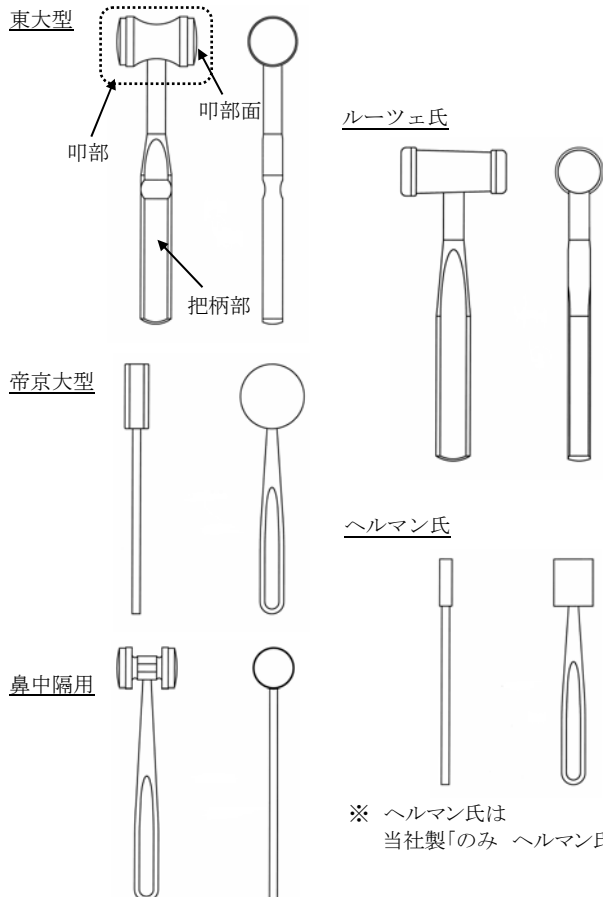

材質:東大型・・・ステンレス(叩部)・アルミ(把柄部)、ナイロン(叩部面)
ルーツェ氏・・・真鍮(叩部)・アルミ(把柄部)、ナイロン(叩部面)
帝京大型・・・真鍮(叩部、把柄部)、ナイロン(叩部面)
ヘルマン氏・・・真鍮(叩部、把柄部、叩部面)
鼻中隔用・・・ステンレス(叩部、把柄部)、ナイロン(叩部面)
表面処理:クロムメッキ、アルマイト
梨地メッキ・黒クロムメッキ(帝京大型、ヘルマン氏)

【使用目的又は効果】

ハンドル、軸及びヘッドからなる金属製の器具をいう。ハンドルは手のひらに適合するように設計され、軸に向かって先細になっており、この軸の先端にヘッドがある。ハンマーヘッドは、通常、円柱形であるが、様々な形状のものもある。衝撃を吸収するため両端にナイロン等の物質を取り付けるハンマーヘッドもある。本品は再使用可能である。

【使用方法等】(*¹³)

耳鼻咽喉科にて使用し、のみ(ヘルマン氏は当社製「のみヘルマン氏」専用)を使う際に叩くハンマーとして使用する。滅菌時は、本体とナイロン部を外さず、組合せたまま滅菌を行うこと。外して滅菌を行うと、再び組み合わせることができなくなる恐れがあります。

【使用上の注意】

- ・ 使用目的以外の目的で使用しないこと。製品の使用に際しては、手技にかなう知識・技術を必要とします。使用方法を熟知し、通常慣例として使用している医師、または医師の指導のもとでご使用ください。
- ・ 本製品は、未滅菌品です。使用には適切な条件で必ず洗浄・滅菌をしてご使用ください。(保守・点検に係る事項参照)
- ・ 鋼製器具は使用目的にあわせ、繊細かつ精巧に作られていますので、変形やキズをつけるなど粗雑な取扱いは製品の寿命を著しく低下させます。
- ・ 使用後は付着した血液・体液・組織及び薬液等が乾燥する前に速やかに洗浄してください。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管は洗浄をした後、腐食・変色・シミを防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥させること。また、滅菌済のものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染の防ぐためにも清潔な場所に保管し、有効保管期間の管理をすること。

【保守・点検に係る事項】(*¹²)(*¹³)

- ・ 器具の取扱いについて、粗雑な扱いは避け、先端等の重要な部分に無理な力や、干渉により双方に損耗が生じないように注意してください。取扱中に破損したり、それによって思わぬケガしたりする場合がありますので十分注意してください。
- ・ 洗浄に使用する洗剤は医療用洗剤を使用してください。また、洗浄には pH が中性に近い(≒pH6~8)洗剤を使用してください。表面がアルマイト処理されている製品(種類:東大型、ルーツェ氏)については、中性の洗剤を使用してください。
- ・ 洗浄装置(ウォッシャーディスインフェクター等)を使用するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意しバケットに収納して洗浄してください。
- ・ 洗浄に使用する水は、蒸留水や脱イオン水をご使用ください。水道水の中には含まれる残留塩素及び有機物質が腐食・変色・シミの原因となります。また、洗剤の残留がないよう十分すすぎを行ってください。
- ・ 洗浄後は直ちに滅菌を行うか、または直ちに乾燥させてください。湿った状態で長時間放置すると器具表面への腐食または変色・シミの原因となります。

- ・ 滅菌前には、汚れ・損傷等が無い点検してください。点検後、適切な条件で必ず滅菌を行ってください。
- ・ 本製品の滅菌には、適切に機能することが確認された高圧蒸気滅菌器による標準的滅菌条件、又は医療機関で滅菌バリデーションが検証され、有効性が立証された滅菌条件で滅菌を行ってください。
- ・ プラズマ滅菌は使用しないでください。（表面が変質し、性状に影響を及ぼします。）
- ・ 本状の他に別途情報提供文書等が同封されている場合にはその指示にも従ってください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者



永島医科器械株式会社

TEL.03-3812-1271

製造業者

永島医科器械株式会社 第三工場