

【警告】



- ・ 本製品は取扱いに注意し、衝撃を加えたり、曲げる様なことはしないこと。
[人体への影響および製品の劣化・破損の原因になります]
- ・ 本製品は、未滅菌品です。使用には必ず洗浄・滅菌を行なうこと。
組合せ製品に関しては必ず分解して洗浄・滅菌を行うこと。
[洗浄・滅菌効果が損なわれ、尚且つ破損の原因となります]
- ・ 製品の使用にあたっては、使用上の性能・性質をご理解の上、不適当な目的に使用しないこと。
[人体への影響および製品の劣化・破損の原因になります]
- ・ 包装から取り出す場合、及び使用前後の洗浄・消毒・滅菌時にはケガなどに十分注意をすること。
[ケガや損傷等をする恐れがあります]

【禁忌・禁止】

- ・ 本製品の加工、改造等は絶対行わないこと。製品に衝撃を加えたり、変形させたり、加工・打刻等の二次加工は行わないこと。
[製品を著しく劣化・消耗させ、故障・破損の原因になります]
- ・ 洗浄前の一次消毒は行なわないこと。
[付着物の変性固着により洗浄・滅菌効果が損なわれます]
- ・ 酸・アルカリ・塩素系の強い洗浄剤および消毒液は使用しないこと。
[製品の劣化・腐食を促進させることになります]
- ・ 黒色に表面加工が施されている製品については、超音波洗浄は行わないこと。[剥離・破損する可能性があります]
- ・ 磨き粉や金属ウール等での器具の表面を磨くことはしないこと。
[製品表面のキズ・損傷・腐食の原因になります]
- ・ 洗浄後、水・蒸留水等のついた状態で長時間放置しないこと。
[製品表面の腐食・変色・シミの原因になります]

※【形状・構造及び原理等】

1. 原材料/材質: ステンレス
表面処理: 黒クロムメッキ(黒加工品)
2. 形状: 慈大型
種類: 直、上向、弱弯、弱弯/上向、弯/左開、弯/右開、
バックワード型/直、バックワード型/弯、
バックワード型/下曲弱弯

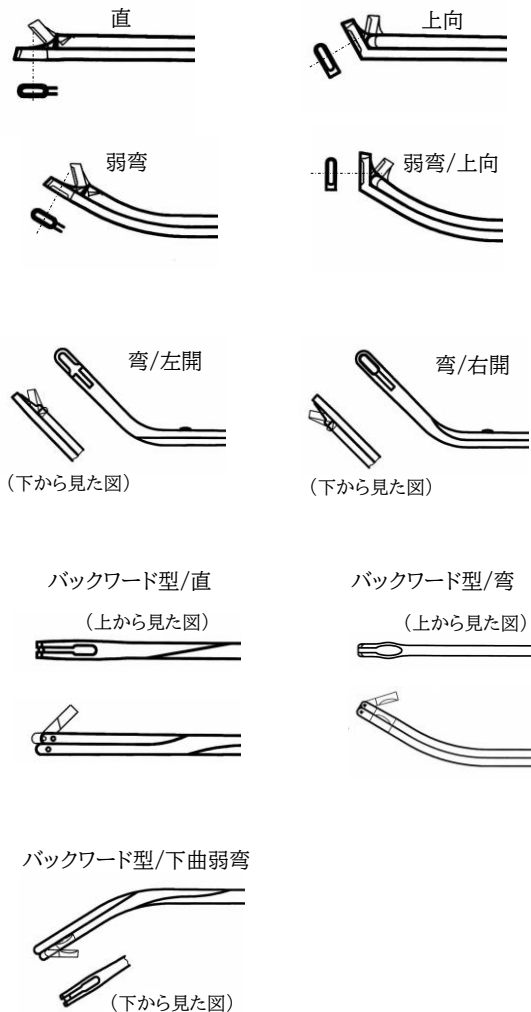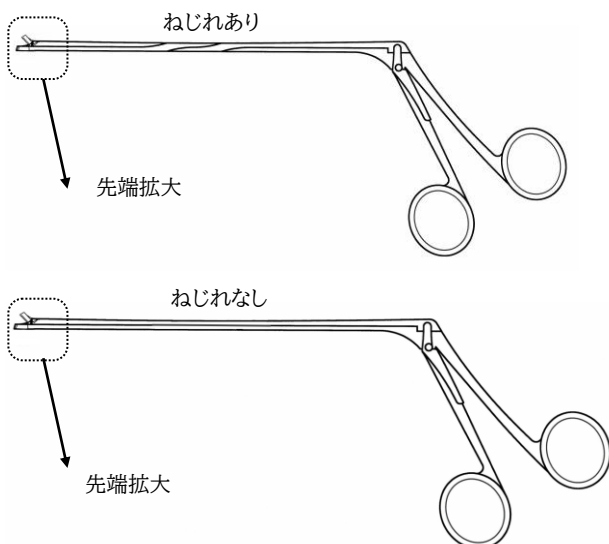

※【使用目的又は効果】

通常、手術時の組織、布、縫合糸等の切断に用いる器具をいう。回転軸のある2枚の刃(通常、ハンドルに親指と他の指用の穴がある)からなり、切断する材料の上で2枚の刃を閉じることによって操作する。本品は再使用可能である。

※【使用方法等】

鼻内視鏡下の手術に使用し、粘膜の切除を行うために用いる。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

電気メス等の高電流が発生する機器との併用はしないこと。

※【使用上の注意】

- ・ 本品は未滅菌品である。使用前には適切な条件で必ず洗浄、滅菌をすること。(保守・点検に係る事項参照)
- ・ 使用開始時や再滅菌して繰り返し使用する際は、高圧蒸気滅菌・プラズマ滅菌・EOG 滅菌が可能である。
- ・ 粗雑な扱いは避け、無理な力や衝撃を与えないように十分注意すること。
[取扱い中に破損したり、思わぬケガをしたりする可能性がある]
- ・ 僅かな変形や破損であっても使用しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】

- ・ 貯蔵・保管する際は、水気や薬品に晒されないようにすること。
- ・ 洗浄後に貯蔵・保管する際は、保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥させること。
[器具表層面への腐食・変色・シミの原因となる]
- ・ 高圧蒸気滅菌後は十分に乾燥させてから保管すること。
[乾燥が不十分な場合、錆や孔食により本品の寿命を著しく低下させる]
- ・ 保管の際は、硬い物への接触や衝撃を避けること。
[変形や損傷の原因となる]

**【保守・点検に係る事項】

<洗浄>

- ・ 磨き粉や金属ウール等で器具の表面を磨かないこと。
- ・ 使用後は付着した血液・体液・組織及び薬液等が乾燥する前に速やかに洗浄すること。
- ・ 塩素系の洗浄剤および消毒液は使用しないこと。洗浄剤および消毒液は弱酸性～弱アルカリ性(≒pH6～8)のものを使用すること。
[塩素系、強アルカリ性、強酸性の薬液は、素材表面の不動態膜を破壊し、錆や孔食による器具の破損につながる]
- ・ 洗浄装置(超音波洗浄装置・ウォッシャー・ディスインフェクター等)を使用するときは、鋭利部同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- ・ 水道水により洗浄を行った場合、残渣除去のため洗浄後に精製水(蒸留水や脱イオン水)ですすぐことを推奨する。
[水道水は中に含まれる残留塩素及び有機物質が腐食・変色・シミの原因となる]
- ・ 洗剤の残留がないように十分すすぎを行うこと。
- ・ 洗浄後は直ちに滅菌を行うか、または直ちに乾燥させること。

<消毒>

- ・ 洗浄前の一次消毒は行わないこと。
[付着物の変性固着により洗浄・滅菌効果が損なわれる]

<滅菌>

- ・ 滅菌前には、汚れ・損傷等が無い点検すること。
また、点検後に適切な条件で必ず滅菌を行うこと。
- ・ 高圧蒸気滅菌を行う場合、水道水ではなく精製水(蒸留水、脱イオン水等)を使用すること。
[滅菌器庫内の高温高湿環境下では、水道水に含まれる塩素がステンレス鋼の防錆力を損ない、錆や孔食により本品の寿命を著しく低下させることがある]

<点検>

- ・ 使用する前に、変形や破損がないか十分確認すること。

<その他>

- ・ ステンレス製品は、定期的に“着色・錆除去剤”でのメンテナンスを推奨する。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者



永島医科器械株式会社

TEL.03-3812-1271

製造業者

永島医科器械株式会社 第三工場