

機械器具 42 医療用剥離子 剥離子 (70952000)

一般医療機器

剥離子

【警告】

- ・ 本製品は取扱いに注意し、衝撃を加えたり、曲げる様なことはしないこと。
[人体への影響および製品の劣化・破損の原因になります]
- ・ 本製品は、未滅菌品です。使用には必ず洗浄・滅菌を行なうこと。
組合せ製品に関しては必ず分解して洗浄・滅菌を行うこと。
[洗浄・滅菌効果が損なわれ、尚且つ破損の原因となります]
- ・ 製品の使用にあたっては、使用上の性能・性質をご理解の上、不
適当な目的に使用しないこと。
[人体への影響および製品の劣化・破損の原因になります]
- ・ 包装から取り出す場合、及び使用前後の洗浄・消毒・滅菌時
にはケガなどに十分注意すること。
[ケガや損傷等をする恐れがあります。]


【禁忌・禁止】

- ・ 本製品の加工、改造等は絶対行わないこと。製品に衝撃を加え
たり、変形させたり、加工・打刻等の二次加工は行わないこと。
[製品を著しく劣化・消耗させ、故障・破損の原因になります]
- ・ 洗浄前の一次消毒は行わないこと。
[付着物の変性固着により洗浄・滅菌効果が損なわれます]
- ・ 酸・アルカリ・塩素系の強い洗浄剤および消毒液は使用しないこと。
[製品の劣化・腐食を促進させることとなります]
- ・ 磨き粉や金属ウール等での器具の表面を磨くことはしないこと。
[製品表面のキズ・損傷・腐食の原因となります]
- ・ 洗浄後、水・蒸留水等のついた状態で長時間放置しないこと。
[製品表面の腐食・変色・シミの原因となります]


【形状・構造及び原理等】

形状:種類(ウルスタイン氏、シェー氏(左・右)、後藤敏郎氏、
レンパート氏(微弯・直))


ウルスタイン氏

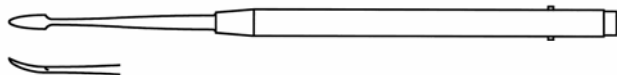

シェー氏(左・右)

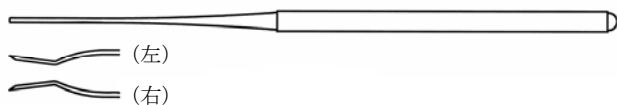

後藤敏郎氏

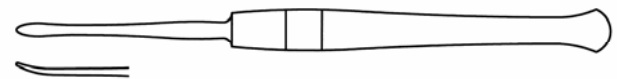

レンパート氏



材質:ステンレス

【使用目的又は効果】(*⁵)

一般外科手術で組織の剥離に用いる器具をいう。本品は再使用可
能である。

【使用方法等】(*⁴)、(*⁵)

耳鼻咽喉科において粘膜を剥離するために使用する。主に鼓室形
成手術で用いる。

【使用上の注意】

- ・ 使用目的以外の目的で使用しないこと。製品の使用に際しては、
手技にかなう知識・技術を必要とします。使用方法を熟知し、通
常慣例として使用している医師、または医師の指導のもとでご使
用ください。
- ・ 本製品は、未滅菌品です。使用には適切な条件で必ず洗浄、滅
菌をしてご使用ください。(保守・点検に係る事項参照)
- ・ 鋼製器具は使用目的にあわせ、繊細かつ精巧に作られています
ので、変形やキズをつけるなど粗雑な取扱いは製品の寿命を著
しく低下させます。
- ・ 使用後は付着した血液・体液・組織及び薬液等が乾燥する前に
速やかに洗浄してください。

【保管方法及び有効期間等】(*⁵)

貯蔵・保管は洗浄をした後、腐食・変色・シミを防ぐために保管期間
の長短にかかわらず必ず乾燥させること。また、滅菌済のものを貯
蔵・保管するにあたっては、再汚染の防ぐためにも清潔な場所に保
管し、有効保管期間の管理をすること。

【保守・点検に係る事項】

- ・ 器具の取扱いについて、粗雑な扱いは避け、先端等の重要な部
分に無理な力や衝撃、干渉により双方に損耗が生じないように注
意してください。取扱中に破損したり、それによって思わぬケガし
たりする場合がありますので十分注意してください。
- ・ ステンレス製品は、定期的に“着色・錆除去剤”でのメンテナンス
をお勧めします。
- ・ 洗浄に使用する洗剤は医療用洗剤を使用してください。また、洗
浄には pH が中性に近い(≒pH6~8)洗剤を使用してください。
- ・ 洗浄装置(超音波洗浄装置・ウォッシャー・ディスインフェクター等)
を使用するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注
意しバケットに収納して洗浄してください。
- ・ 洗浄に使用する水は、蒸留水や脱イオン水をご使用ください。水
道水は中に含まれる残留塩素及び有機物質が腐食・変色・シミ
の原因となります。また、洗剤の残留がないよう十分すすぎを行っ
てください。
- ・ 洗浄後は直ちに滅菌を行うか、または直ちに乾燥させてください。
湿った状態で長時間放置すると器具表面への腐食または変色・
シミの原因となります。
- ・ 滅菌前には、汚れ・損傷等が無い点検してください。点検後、
適切な条件で必ず滅菌行ってください。
- ・ 本製品は下記滅菌が可能です。組合せ製品の場合は必ず分解
してから滅菌を行ってください。
 - ◇ 高圧蒸気滅菌
 - ◇ プラズマ滅菌
 - ◇ EOG 滅菌
- ・ 本状の他に別途情報提供文書等が同封されている場合にはそ
の指示にも従ってください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(*⁵)

製造販売業者

永島医科器械株式会社



TEL.03-3812-1271

製造業者

永島医科器械株式会社 第三工場