

剪刀

【警告】

- ・ 本製品は取扱いに注意し、衝撃を加えたり、曲げたりしないこと。
[人体への影響及び製品の劣化・破損の原因になる。]
- ・ 本製品は、未滅菌品です。使用には必ず洗浄・滅菌を行なうこと。
組合せ製品に関しては必ず分解して洗浄・滅菌を行うこと。[洗浄・滅菌効果が損なわれ、また、破損の原因となる。]
- ・ 包装から取り出す場合及び使用前後の洗浄・消毒・滅菌を行う場合、ケガなどに十分注意をすること。[ケガや損傷等をするおそれがある。]


【禁忌・禁止】

- ・ 製品に衝撃を加えたり、変形させたり、加工・打刻等の二次加工は行わないこと。[製品を著しく劣化・消耗させ、故障・破損の原因になる。]
- ・ 洗浄前の一次消毒は行わないこと。[付着物の変性固着により洗浄・滅菌効果が損なわれる。]
- ・ 酸・アルカリ・塩素系の強い洗浄剤及び消毒液は使用しないこと。
[製品の劣化・腐食を促進させることになる。]
- ・ 黒色に表面加工が施されている製品については、超音波洗浄は行わないこと。[剥離する可能性がある。]
- ・ 磨き粉や金属ウール等での器具の表面を磨くことはしないこと。
[製品表面のキズ・損傷・腐食の原因になる。]
- ・ 洗浄後、水・蒸留水等のついた状態で長時間放置しないこと。
[製品表面の腐食・変色・シミの原因になる。]


** 【形状・構造及び原理等】

形状: 堀口氏(直、反)、シェー氏(直、右曲、左曲、上向)、斎藤氏(直、上向、左曲、右曲、上向/右開、上向/左開)、京大型 鉗子状(直、左開、右開)


堀口氏

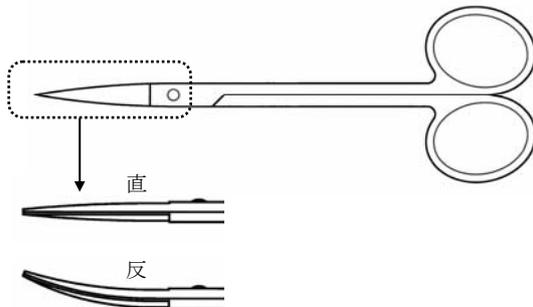


シェー氏

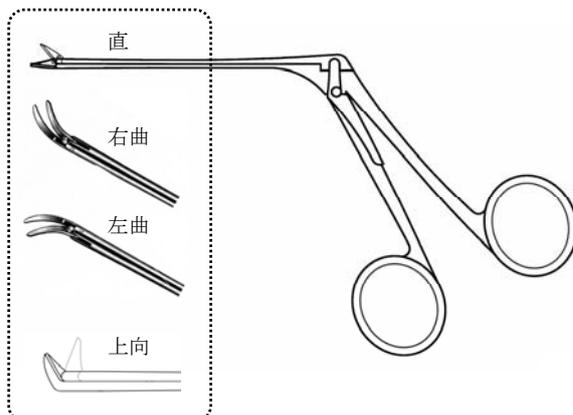

斎藤氏

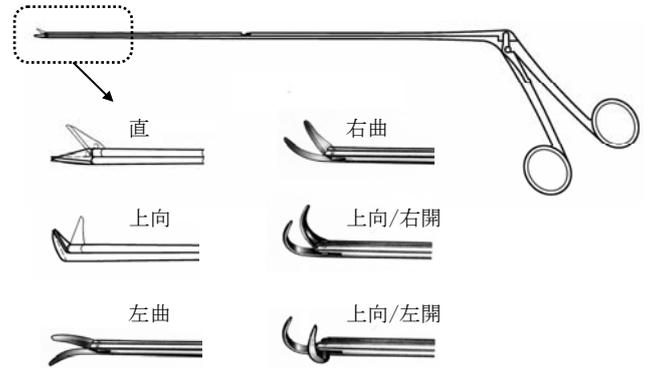

京大型 鉗子状

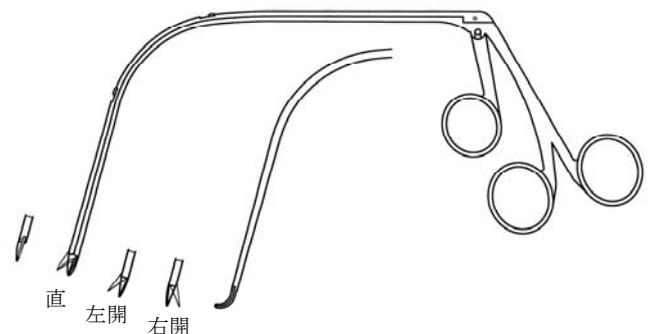

材質: ステンレス鋼

表面処理: 梨地仕上げ又は黒クロムメッキ(黒加工品)

* 【使用目的又は効果】

手術時の組織、布、縫合糸等の切断に用いる器具をいう。回転軸のある2枚の刃(通常、ハンドルに親指と他の指用の穴がある)からなり、切断する材料の上で2枚の刃を閉じることによって操作する。本品は再使用可能である。

** 【使用方法等】

- ・ 堀口氏及びシェー氏の場合:
内耳開窓術に使用する。
- ・ 斎藤氏及び京大型 鉗子状の場合:
ラリngoマイクロ術に使用し、声帯にできたポリープを切除するために用いる。

** 【使用上の注意】

- ・ 本製品は、未滅菌品です。使用には適切な条件で必ず洗浄・滅菌して使用すること(保守・点検に係る事項参照)。
- ・ 使用前の保守油除去
納品された本製品には、作動を滑らかにする等の目的で保守油が付いています。保守油を次の方法により除去してから洗浄・滅菌処理を行うこと。保守油が付着したまま高圧蒸気滅菌すると器具が変色する原因になる。
1) 保守油の除去方法
エタノール浸漬又は保守油除去用洗浄剤により保守油を除去し乾燥を行うこと。一度で除去しきれない場合は、2~3度同様の作業を行うこと。
2) 保守油除去後の処理
潤滑剤は水溶性潤滑剤を使用すること。
- ・ 鋼製器具は使用目的にあわせ、繊細かつ精巧に作られているので、変形やキズをつけるなど粗雑な取扱いは、製品の寿命を著し

く低下させます。特に先端等の重要な部分に無理な力や衝撃、干渉により双方に損耗が生じないように注意すること。取扱中に破損したり、それによって思わぬケガしたりする場合は考えられるので十分注意すること。

- ・ 使用後は付着した血液・体液・組織・薬液等が乾燥する前に速やかに洗浄すること。
- ・ 黒クロムメッキの場合、使用前にメッキ剥がれがないか確認すること。[洗浄や滅菌を繰り返すことでメッキ劣化のおそれがある。]

**【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管は洗浄をした後、腐食・変色・シミを防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥させること。また、滅菌済のものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐためにも清潔な場所に保管し、有効保管期間の管理をすること。

また、可動部は水溶性潤滑剤を塗布すること。

**【保守・点検に係る事項】

- ・ ステンレス製品(黒色に表面加工が施されている製品は除く)は、定期的に“着色・錆除去剤”でのメンテナンスをお勧めします。
- ・ 洗浄に使用する洗剤は医療用洗剤を使用してください。また、洗浄には pH が中性に近い(pH6~8)洗剤を使用してください。
- ・ 洗浄装置(ウォッシャー・ディスインフェクター等)を使用するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意しバケットに収納して洗浄してください。
- ・ 洗浄に使用する水は、蒸留水や脱イオン水をご使用ください。水道水は中に含まれる残留塩素及び有機物質が腐食・変色・シミの原因となります。また、洗剤の残留がないよう十分すすぎを行ってください。
- ・ 洗浄後は直ちに滅菌を行うか、又は直ちに乾燥させてください。湿った状態で長時間放置すると器具表面への腐食又は変色・シミの原因となります。
- ・ 滅菌前には、汚れ・損傷等が無い点検してください。点検後、適切な条件で必ず滅菌行ってください。
- ・ 本製品は下記滅菌が可能です。組合せ製品の場合は必ず分解してから滅菌を行ってください。
 - ◇高圧蒸気滅菌
 - ◇プラズマ滅菌
 - ◇EOG 滅菌
- ・ 本状の他に別途情報提供文書等が同封されている場合にはその指示にも従ってください。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 永島医科器械株式会社



TEL. 03-3812-1271

製造業者: 永島医科器械株式会社 第三工場