

機械器具 42 医療用剥離子 剥離子 (70952000)  
一般医療機器

前頭洞・蝶形洞用吸引剥離子

【警告】


- 本製品は取扱いに注意し、衝撃を加えたり、強く曲げる様なことはしないこと。  
[人体への影響および製品の劣化・破損の原因になります]
- 本製品は、未滅菌品です。使用には必ず洗浄・滅菌を行なうこと。組合せ製品に関しては必ず分解して洗浄・滅菌を行うこと。  
[洗浄・滅菌効果が損なわれ、尚且つ破損の原因となります]
- 製品の使用にあたっては、使用上の性能・性質をご理解の上、不適当な目的に使用しないこと。  
[人体への影響および製品の劣化・破損の原因になります]
- 箱から取り出す場合、及び使用前後の洗浄・消毒・滅菌時にはケガなどに十分注意をすること。  
[ケガや損傷等をする恐れがあります。]

【禁忌・禁止】

- 本製品の加工、改造等は絶対行わないこと。製品に衝撃を加えたり、無理な変形をさせたり、加工・打刻等の二次加工は行わないこと。  
[製品を著しく劣化・消耗させ、故障・破損の原因になります]
- 洗浄前の一次消毒は行わないこと。  
[付着物の変性固着により洗浄・滅菌効果が損なわれます]
- 酸・アルカリ・塩素系の強い洗浄剤および消毒液は使用しないこと。  
[製品の劣化・腐食を促進させることになります]
- ウォッシュャーディスインフェクターを使った洗浄は行わないこと。  
[破損する可能性があります]
- 洗浄後、水・蒸留水等のついた状態で長時間放置しないこと。  
[製品表面の腐食・変色・シミの原因になります]

【形状・構造及び原理等】 (\*<sup>5</sup>)

形状:名市大鈴木式 久保氏改良型

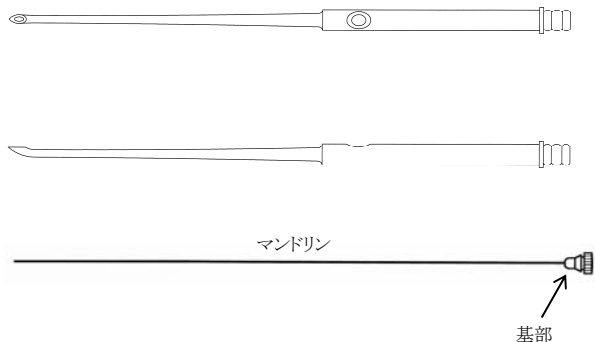

材質:ステンレス、銀、真鍮(マンドリン基部)  
表面処理:クロムメッキ(マンドリン基部)

【使用目的又は効果】 (\*<sup>4</sup>)

一般外科手術で組織の剥離に用いる器具をいう。本品は再使用可能である。

【使用方法等】 (\*<sup>4</sup>)

前頭洞・蝶形洞及び下垂体領域の切除や剥離するために使用する。また、切除・剥離をしながら血液等を吸引できるようになっている。本製品は導中がフレキシブルになっており、曲げて(角度を変えて)使用することができる。

【使用上の注意】

- 使用目的以外の目的で使用しないこと。製品の使用に際しては、手技にかなう知識・技術を必要とします。使用方法を熟知し、通

常慣例として使用している医師、または医師の指導のもとでご使用ください。

- 本製品は、未滅菌品です。使用には適切な条件で必ず洗浄、滅菌をしてご使用ください。(保守・点検に係る事項参照)
- 鋼製器具は使用目的にあわせ、繊細かつ精巧に作られていますので、変形やキズをつけるなど粗雑な取扱いは製品の寿命を著しく低下させます。
- 本製品は材質上、使用・未使用に関係なく酸化が進行します。(保管状態でも同様) 酸化により黒ずみが発生した場合は、柔らかい布に磨き剤(研磨剤)等を塗布して拭き取ってください。
- 使用後は付着した血液・体液・組織及び薬液等が乾燥する前に速やかに洗浄してください。

【保管方法及び有効期間等】 (\*<sup>4</sup>)

貯蔵・保管は洗浄をした後、腐食・変色・シミを防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥させること。また、滅菌済のものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染の防ぐためにも清潔な場所に保管し、有効保管期間の管理をすること。

【取扱い上の注意】

本製品を強く曲げたり無理な変形をさせると破損の恐れがあるためしないこと。

【保守・点検に係る事項】

- 器具の取扱いについて、粗雑な扱いは避け、先端等の重要な部分に無理な力や衝撃、干渉により双方に損耗が生じないように注意してください。取扱中に破損したり、それによって思わぬケガしたりする場合は考えられますので十分注意してください。
- 洗浄に使用する洗剤は医療用洗剤を使用してください。また、洗浄には pH が中性に近い(≒pH6~8)洗剤を使用してください。
- 洗浄装置(超音波洗浄装置等)を使用するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意しバケットに収納して洗浄してください。本製品は材質上、製品の破損に繋がるためウォッシュャーディスインフェクターは使用しないでください。
- 洗浄に使用する水は、蒸留水や脱イオン水をご使用ください。水道水は中に含まれる残留塩素及び有機物質が腐食・変色・シミの原因となります。また、洗剤の残留がないよう十分すすぎを行ってください。
- 洗浄後は直ちに滅菌を行うか、または直ちに乾燥させてください。湿った状態で長時間放置すると器具表面への腐食または変色・シミの原因となります。
- 滅菌前には、汚れ・損傷等が無い点検してください。点検後、適切な条件で必ず滅菌行ってください。
- 本製品は下記滅菌が可能です。組合せ製品の場合は必ず分解してから滅菌を行ってください。
  - ◇高圧蒸気滅菌
  - ◇プラズマ滅菌
  - ◇EOG 滅菌
- 本製品は材質上、高圧蒸気滅菌を行うと黒ずみの症状が現れる場合があります。なるべく他の滅菌法または消毒を推奨します。
- 本状の他に別途情報提供文書等が同封されている場合にはその指示にも従ってください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 (\*<sup>4</sup>)

製造販売業者

永島医科器械株式会社



TEL.03-3812-1271

製造業者

永島医科器械株式会社 第三工場