

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 70904000

クリーニングパウダー

**【禁忌・禁止】

- 1) 適用対象（患者）
 - ・ 以下のような患者には使用しないこと。
 - ナトリウム摂取に関して制限のある者（高ナトリウム血症、妊娠中毒症、腎臓疾患、慢性呼吸疾患及び慢性下痢）。[症状が悪化するおそれ]
 - 呼吸器疾患のある患者。[症状が悪化するおそれ]
 - 病的に深い歯周ポケット（6 mm以上）、及び粘膜病変のある患者。[軟組織や唾液腺付近へ長時間（5秒程度以上）噴射すると本品を含んだエアが入り、ごく稀に皮下気腫を生じるおそれ]
 - 重篤な消化器官潰瘍のある患者。[症状が悪化するおそれ]
 - 肝臓障害のある患者。[症状が悪化するおそれ]
 - 心機能障害、肺機能障害のある患者。[症状が悪化するおそれ]
 - 口腔内に疾患（口内炎、口腔粘膜炎等）がある患者。[症状が悪化するおそれ]
 - コンタクトレンズを装着している患者。[目を傷つけるおそれ]
 - ・ 以下の状態にある患者には使用しないこと。
 - 口腔内に損傷（外傷、熱傷等）が認められる患者。[症状が悪化するおそれ]
 - 口腔内に炎症、潰瘍、充血、出血、びらん、まひ感等が認められる患者。[症状が悪化するおそれ]
 - ・ 本品、又は本品に含まれる成分に対してアレルギー症状の既往歴がある患者には使用しないこと。
- 2) 使用方法
 - ・ 歯根セメント、脱灰エナメル質、充填物、補綴物・充填物のマージン及びクラウン等には直接噴射しないこと。[それらの表面を傷つけるおそれ]
 - ・ 口腔内の軟組織や歯肉、歯肉縁下に向け直接噴射しないこと。[皮下気腫などの偶発症が生じるおそれ]

**【使用方法等】

詳細については、製造販売業者が指定する電動型機器接続歯面清掃用器具「販売名：プロフィーメイト、承認番号：22200BZX00169000（以降はプロフィーメイトという）」及び「販売名：プロフィーメイト neo、認証番号：223ALBZX00029000（以降はプロフィーメイト neoという）」の取扱説明書を参照すること。

1) 使用前準備

- ① 「プロフィーメイト」又は「プロフィーメイト neo」を歯科用ユニットのホースに接続する。
- ② パウダーケースキャップを開け、本品1袋を全て入れる。
- ③ 補充後、パウダーケースキャップをしっかりと閉める。

2) 使用方法

- ① スピットンに向かい2～3秒噴射し、本品と水、エアがまざりきれいにしていることを確認する。
- ② 「プロフィーメイト」又は「プロフィーメイト neo」のノズルを歯面より5～10 mm離して使用する。使用時は、バキューム又はエジェクターを併用し口腔内に溜まった本品の溶液を吸引する。

3) 使用後


使用後は、「プロフィーメイト」又は「プロフィーメイト neo」に残った本品を除去する。

**【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・ 本品は「プロフィーメイト」及び「プロフィーメイト neo」専用である。他の電動型機器接続歯面清掃用器具に補充して使用しないこと。
- ・ 患者が本品を大量に飲み込まないよう、必ずバキューム、又はエジェクターを併用すること。
- ・ 本品の飛散を抑えるため、水をノズルから噴射させながら、使用すること。
- ・ 本品は1袋単位で使用し、余ったものは廃棄すること。
- ・ 開封後長時間経過した本品は使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】

1) 形状

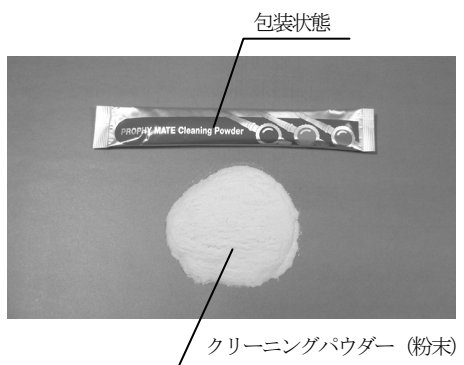

種類	容量
袋タイプ	12 g

2) 主な原材料

重炭酸ナトリウム

3) 原理

重炭酸ナトリウムを吹き付けることにより、歯面に付着した歯石、タバコのヤニ、茶渋等を清掃する。

【使用目的又は効果】

歯面の清掃。

**【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

- ・ 万一、目に本品が入った場合は、すぐに大量の水で目を洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- ・ 本品が口腔以外の粘膜部分（目、鼻等）に入らないようにすること。例えば、患者の顔をタオルのようなもの、又は防護用眼鏡等で保護すること。また、術者、アシスタントとも常時保護眼鏡、防塵マスクを着用すること。
- ・ 患者がコンタクトレンズを装着している場合は、コンタクトレンズを外させること。
- ・ 長時間の連続使用は避け、患者に休憩時間を与えさせること。
- ・ 患者の唇にワセリン等を塗り、口角の乾燥、又はひび割れを防ぐこと。
- ・ 使用中にアレルギー症状が発現した患者には使用を中止し、医師の診断を受けること。

*【保管方法及び有効期間等】

1) 保管の条件

- ・ 水、薬品、油、有機溶剤のかからない場所に保管すること。
- ・ 気圧、温度、湿度、風通し、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれがなく、直射日光の当たらない（温度60度以下）、湿気の無い暗い場所に保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ナカニシ

ナカニシお客様相談窓口

0120-7242-56

受付時間 9:00～17:00（土日・祝祭日を除く）

TEL：0289-64-3380

FAX：0289-62-5636

「プロフィーメイト」又は「プロフィーメイト neo」の取扱説明書を必ずご参照ください。

OM-Z0111 003