

機械器具 42 医療用剥離子
一般医療機器 歯科用起子及び剥離子 70683000
ソケットリフト ハンドインスツルメント

*【禁忌・禁止】

以下の状態のものは使用しないこと。

- 傷、曲がり、錆が生じたもの。〔破折によるけがのおそれ〕

*【形状・構造及び原理等】

1) 構造



2) 主な原材料

ステンレス鋼、チタン合金

3) 原理

口腔内手術で粘膜等の組織の剥離に用いる。

【使用目的又は効果】

口腔内手術で粘膜等の組織の剥離に用いる。

*【使用方法等】

1) 使用前準備

本品は未滅菌の状態を提供されるため、初回使用前に必ず【保守・点検に係る事項】に記載の方法に従い洗浄及び滅菌を行う。

2) 使用方法

- ① ソケットリフト用チップを用いて、上顎洞底粘膜下まで骨を穿孔する。
- ② 本品を用いて、粘膜組織の剥離をする。

3) 使用後

【保守・点検に係る事項】に記載の方法に従い洗浄及び滅菌を行う。

*【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

- ・術中の方が一故障を想定して、予備を必ず用意すること。
- ・酸化電位水（強酸性水、超酸性水）、強酸、強アルカリ性の薬剤、塩素含有の溶液、ベンジン、シンナー等の溶剤で洗浄、浸漬、拭き取りをしないこと。

2) その他の注意

- ・落下させるなど強い衝撃を与えないこと。
- ・治療部位に、無理な力を加えて使用しないこと。
- また、デコとして使用しないこと。

*【保管方法及び有効期間等】

1) 保管方法

- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれのない場所に保管すること。

*【保守・点検に係る事項】

1) 洗浄、滅菌

- ① 使用後は速やかに血液、体液等の表面の汚れを落とし、消毒用アルコールで清掃する。
- ② オートクレープ用バックに入れて 135℃までのオートクレープ滅菌を行い、使用時までオートクレープ用バックに入れたまま清潔な状態を保てる場所に保管する。

〔推奨する滅菌条件〕

高圧蒸気滅菌（オートクレープ）

温度	時間
121℃	20分間
134℃	3分間

オートクレープ滅菌以外の滅菌方法は確認していません。

・洗浄に関する注意

- 使用後は付着している血液、体液、組織及び薬品などを洗浄すること。
- 汚染除去に用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- 超音波洗浄機等の洗浄装置で洗浄するときには、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- 洗浄剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。仕上げのすすぎには、できるだけ精製水を用いること。
- 洗浄後は、腐食防止のため、直ちに乾燥すること。
- 洗浄の際、クレンザー（磨き粉）や金属たわしの使用は避けること。
- 本品は未滅菌品であり、使用前に必ず洗浄及び滅菌してから使用すること。

・滅菌に関する注意

- オートクレープ滅菌以外の滅菌は行わないこと。
- 乾燥工程で 135℃を超えてしまう場合は乾燥工程を省くこと。
- 滅菌直後は、高温となっているため、触れないこと。

2) 使用者による保守点検事項

使用前に形状に異常（先端部の曲がり、折れ、カケ等）がないことを必ず確認する。（毎回）

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ナカニシ

ナカニシお客様相談窓口

0120-7242-56

受付時間 9:00～17:00（土日・祝祭日を除く）

TEL：0289-64-3380

FAX：0289-62-5636