

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯面研磨材 70904000

## メルサージュ エピック パウダー ペリオ


## 【禁忌・禁止】

## 1) 適用対象（患者）

- 以下のような患者には使用しないこと。
  - 呼吸器疾患のある患者。[症状が悪化する恐れ]
  - 病的に深い歯周ポケット（6mm以上）、及び歯肉病変のある患者。  
[軟組織や唾液腺付近へ長時間（5秒程度以上）噴射すると本品を含んだエアが入り、ごく稀に皮下気腫を生じる恐れ]
  - 重篤な消化器官潰瘍のある患者。[症状が悪化する恐れ]
  - 心機能障害、肺機能障害のある患者。[症状が悪化する恐れ]
  - 口腔内に疾患（口内炎、口腔粘膜炎等）がある患者。[症状が悪化する恐れ]
- 以下の状態にある患者には使用しないこと。
  - 口腔内に損傷（外傷、熱傷等）が認められる患者。[症状が悪化する恐れ]
  - 口腔内に炎症、潰瘍、充血、出血、びらん、まひ感等が認められる患者。[症状が悪化する恐れ]
- 以下の患者に対する深い歯周ポケットへの使用はしないこと。
  - 心内膜炎のある患者。[菌血症の恐れ]
  - 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人、授乳中の婦人。[菌血症の恐れ]
  - 伝染病の患者。[菌血症の恐れ]
  - 免疫不全症（好中球減少症、顆粒球減少症、無顆粒球症、糖尿病、血友病）の患者。[菌血症の恐れ]
  - 放射線治療中、化学療法治療中、抗生物質投与中の患者。[菌血症の恐れ]
- 本品、又は本品に含まれる成分に対してアレルギー症状の既往歴がある患者には使用しないこと。

## 【形状・構造及び原理等】

## 1) 形状

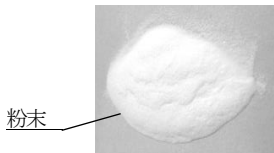

種類	容量
ボトル（キャップ/注ぎ口付）	16.0 g

## 2) 主な原材料

グリシン

## 3) 原理

本品を圧縮空気、水と共に吹き付けることによる表面研磨。

## 【使用目的又は効果】

粉末状の研磨材で、歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いる。

## 【使用方法等】

詳細については取扱説明書を参照すること。

- ① 本品を装置に補充後、歯面の清掃及び研磨を行う。
- ② 使用後は装置に残った本品を除去する。

## 【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 製造販売業者が指定する装置以外に補充して使用しないこと。
- 使用するエアは、清浄な乾燥したエアを使用すること。[エアに水分、油分が混じっていると本品が固まる恐れ]
- 患者が本品を大量に飲み込まないよう、必ずバキューム、又は排唾管を併用すること。

- 使用前に本品の包装が潤滑又は破損していないか確認すること。
- 本品を補充する前に、本品のボトルをよく振ること。[本品が固まり、詰まりの恐れ]
- 本品の補充はゆっくりと行い、本品の飛散に注意すること。
- 本品の飛散を抑えるため、水をノズルから噴射させながら、使用すること。
- 開封したまま長時間経過した本品は使用しないこと。必ず乾燥した新しい本品を使用し、使用後に余った本品は廃棄すること。

## 【使用上の注意】

## 1) 重要な基本的注意

- 使用中にアレルギー症状や口内炎の症状が認められた場合は直ちに使用を中止し、医師の診断を受けること。
- 腎機能障害のある患者は担当医に相談後、本品を使用すること。
- 人工心臓弁、人工関節を装着し、抗凝固剤を服用している患者は出血症、菌血症を防ぐため、担当医に相談後、本品を使用すること。
- 本品を使用した処置により発疹、皮膚炎などの過敏症があらわれた場合や、気腫が発生した場合は、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けること。
- 飛散した本品が患者の口腔以外の粘膜部分（目、鼻等）に入らないように十分に注意すること。例えば、患者の顔をタオルのようなもの、又は防護用眼鏡等で保護すること。
- 万一、目に本品が入った場合は、すぐに大量の水で目を洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- 使用の際は、術者、アシスタントとも常時、保護眼鏡、防塵マスクを着用すること。また、噴射した本品をバキューム等で吸い取りながら使用すること。
- 患者がコンタクトレンズを装着している場合は、保護眼鏡を着用させるか、コンタクトレンズを外してから治療すること。
- 長時間の連続使用は避け、患者には休憩等がいをさせること。
- 患者の唇にワセリン等を塗り、口角の乾燥又はひび割れを防ぐこと。
- 歯の染色を引き起こしてしまう可能性があるため、処置後、2～3時間以内は喫煙、着色効果のある飲食をしないよう患者に指導すること。

## 2) その他の注意

- 結石及び歯石は本品にて除去できないため注意すること。
- 使用後、使い残しの本品は決してボトルに戻さないこと。


## 【保管方法及び有効期間等】

詳細については取扱説明書を参照すること。

## 使用期間（使用期限）

本品の包装に記載の使用期限までに使用すること。

[記載の使用期限は、自己認証（製造販売業者データ）による]

例：  YYYY-MM-DD 使用期限 YYYY 年 MM 月 DD 日を示す。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ナカニシ

ナカニシお客様相談窓口



0120-7242-56

受付時間 9:00～17:00（土日・祝祭日を除く）

TEL：0289-64-3380

FAX：0289-62-5636

製造業者：ドクターヴィットマン

（Dr. Wittmann GmbH &amp; Co. KG）

国名：ドイツ

販売元 株式会社 松風

住所 〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町11

電話番号（お客様サポート窓口）075-778-5482

取扱説明書を必ずご参照ください。