

* 機械器具 61 歯科用ハンドピース


* 管理医療機器 ストレート・ギアードアングルハンドピース 70692000

* 特定保守管理医療機器 エンド用コントラ VM

**【形状・構造及び原理等】

1) 構造

VM-E4R

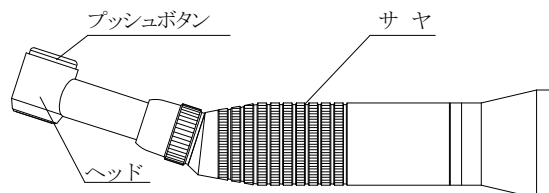

種類名	チャック形式	使用可能なファイル
エンド用コントラ VM	プッシュボタン	柄部直径 φ3.8～φ4.1mm 手用ファイル

**【使用目的又は効果】

手用ファイル又はリーマを取り付け、感染根管の内容物の除去及び清掃拡大を行うために用いられる。

**【使用方法等】

1) 使用前準備

- 使用前に必ず【保守・点検に係る事項】に記載の方法に従い、清掃、消毒、注油、滅菌を行う。
- JIS T 5904 (対応国際規格: ISO 3964) に規定されたジョイントを有するマイクロモーター又はエアモーター（以降はモーターという。）に接続する。
- ヘッド先端へ手用ファイルを取り付け、回転数を 8,000min⁻¹以下にセツトする。
- 【保守・点検に係る事項】に記載の方法に従い、使用前点検を行う。

2) 使用方法

モーターを作動させ、使用を開始する。

3) 使用後

- モーターを停止させ、本品からモーター、ファイルを取り外す。
- 【保守・点検に係る事項】に記載の方法に従い、清掃、消毒、注油、滅菌を行う。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 製造販売業者が指定した最大回転数を超えないこと。
- 製造販売業者が指定したファイル以外のものを使用しないこと。
- ハンドピースを取り外す際は、モーターの回転が完全に停止してから行うこと。
- ヘッド回転数は 8,000min⁻¹を超えないこと。
- ファイルを装着した際は、必ずファイルを前後に押し引きし、確実に固定されていることを確認してから使用を開始すること。
- 使用中に異常を感じたら、直ちに使用を中止すること。

**【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

- 本品を取り扱う時は保護メガネ、マスク等を着用すること。
- 酸化電位水（強酸性水、超酸性水）、強酸、強アルカリ性の薬剤、塩素含有の溶液、ベンジン、シンナー等の溶剤による洗浄、浸漬、拭き取りをしないこと。

2) その他の注意

落下させる等の強い衝撃を与えないこと。

**【保管方法及び有効期間等】

＜耐用期間＞

製造の日から、正規の保守点検（消耗部品の交換）を行った場合に限り 7 年間 [自己認証（当社データ）による] とする。

**【保守・点検に係る事項】

1) 清掃・消毒・注油・滅菌

- 本品表面の汚れをブラシ（金属製は不可）等で払い落とし、消毒用アルコールを含ませた綿等で拭き取る。
- 製造販売業者指定のスプレー（以降はスプレーという。）を本品の後に差し込み、約 2 秒間注油を行う。
- 滅菌パックに入れて 135℃ までの温度でオートクレーブ滅菌を行う。

【推奨する滅菌条件】

高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）

温度	時間
121℃	20 分間
132℃	15 分間

・注油に関する注意

- 滅菌前には必ずスプレーで注油すること。
- 注油をする際、スプレーの圧力により、本品が飛び出さないよう確実に押さえること。
- スプレーは、本品の先端よりオイルが出るまで（約 2 秒間）行うこと。

・滅菌に関する注意

- 乾燥工程を含め、135℃ を超える温度でオートクレーブ滅菌を行わないこと。
- 薬液の付着した器具と一緒に滅菌しないこと。また、オートクレーブ滅菌器の中には薬液が入らないように注意すること。[表面が変色したり、内部部品に影響を与えるおそれ]

2) 使用者による保守点検事項

＜使用前点検＞

患者の口腔外で回転させ、ガタ、振動、音、温度（発熱）等の異常がないことを確認する。（毎回）

＜消耗部品の交換＞

メタルの交換については取扱説明書を参照すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は住所等】

製造販売業者：株式会社ナカニシ

ナカニシお客様相談窓口

0120-7242-56

受付時間 9:00～17:00（土日・祝祭日を除く）

TEL：0289-64-3380

FAX：0289-62-5636