

**2021年4月改訂(第5版)

*2020年4月改訂(第4版)

機械器具(06)呼吸補助器

管理医療機器 酸素投与キット(JMDN:12855000)

酸素吸入セット

再使用禁止

エアゾールマスク NK-3200, NK-3250


【禁忌・禁止】*

本品は1患者専用のディスポーザブル製品です。
再使用はしないこと。

- 必要に応じてストラップの両端を引いてマスクを固定します。
- ノーズクリップをつまむと、顔面により確実に固定できます。
- 蛇腹管接続口に、別途用意するネブライザーからの蛇腹管(内径φ22mm)を接続してください。

【形状・構造及び原理等】

■形状

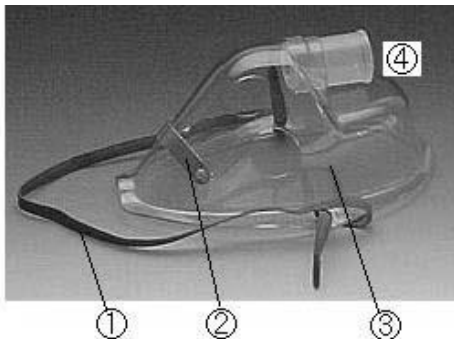

■組成 **

番号	部 品 名	材 質
①	ス ト ラ ッ プ	ポリエステル ファイバー
②	ノーズクリップ	アルミ板
③	マスク本体	医療用ポリ塩化ビニル
④	蛇腹管接続口	ポリプロピレン樹脂

■種類 **

商品コード	サイズ	蛇腹管接続口
NK-3200	成人用	外径φ22mm
NK-3250	小児用	

■作動・動作原理 **

マスクで患者の口および鼻を被覆し、蛇腹管接続口に酸素を送入する蛇腹管を接続することで酸素を供給します。

【使用目的又は効果】

■使用目的 **

本品は、患者の気道内に高湿度の空気・酸素ガスを供給するエアゾール吸入療法に使用します。

【使用方法等】

■使用方法 **

- 本品をビニル袋から取り出し、ゴミ・汚れ・損傷等がないことを確認してください。
- マスクを装着し、ストラップを後頭部にかけてください。

【使用上の注意】**

- 本品は未滅菌品です。滅菌して使用する場合には、オートクレーブ滅菌及び乾熱滅菌等、材質に影響をおよぼすおそれのある滅菌又は消毒を行わないでください。
- 本品は、1患者専用です。患者毎に交換してください。
- 本品の使用中は発火物を近づけないでください。(引火、爆発のおそれがあります)
- 長期にわたり使用する場合、衛生管理に注意してください。変質・硬化したものは使用しないでください。
- 本品の使用時、発疹等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の指示に従ってください。
- ネブライザーの取扱方法は、別途ネブライザーの添付文書等を参照してください。

【保管方法及び有効期間等】

■保管方法 **

浸水に注意し、高温多湿・直射日光を避けて保管してください。

■使用期限

製造後3年以内(使用期限内であっても破損、変色等が発生した時点で廃棄してください)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 中村医科工業株式会社

製造業者: GaleMed Limited Taipei Branch/台湾