

機械器具 (06) 呼吸補助器

管理医療機器 部分再呼吸式マスク (JMDN: 35174000)

酸素フェースマスク リザーバーバッグ付 (高濃度用)

再使用禁止


NK-3664, NK-3665

【禁忌・禁止】*

本品は 1 患者専用のディスポーザブル製品です。
再使用はしないこと。

【形状・構造及び原理等】

■形状

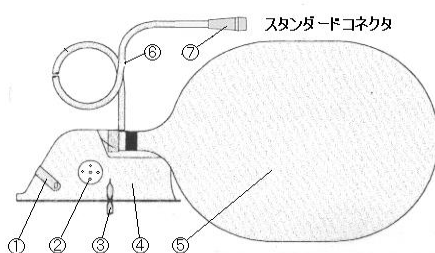

■組成

番号	部 品 名	材 質
①	ノーズクリップ	アルミニウム
②	呼吸孔	—
③	ストラップ	ポリエステルファイバー
④	マスク本体	医療用ポリ塩化ビニル
⑤	リザーバーバッグ	ポリエチレン樹脂
⑥	酸素チューブ	医療用ポリ塩化ビニル
⑦	スタンダードコネクタ	医療用ポリ塩化ビニル

■種類 **

商品コード	サイズ	酸素チューブ
NK-3664	小児用	チューブ全長: 2m チューブ断面: ラウンド型
NK-3665	成人用	コネクタ: スタンダード

■作動・動作原理

リザーバーバッグ内に呼気ガスと新鮮な酸素との混合ガスを貯留し、マスクを通じて高濃度の酸素を供給します。

【使用目的又は効果】**

■使用目的

患者の肺胞内に空気と酸素の混合ガスを供給するために用います。

【使用方法等】

1. 本品をビニル袋から取り出し、ゴミ・汚れ・傷等がないことを確認してください。
2. 酸素チューブのコネクタの一端を酸素流量計の加湿瓶等に、他端をリザーバーバッグの接続口に確実に接続してください。
3. 患者の口と鼻をマスクで覆い、ストラップを後頭部にかけてください。

4. 必要に応じて、ストラップの両端を引いてマスクを固定させます。
5. ノーズクリップをつまむことにより、顔面により確実に固定ができマスクのズレを防ぐことができます。

酸素流量及び FiO₂ の目安

FiO ₂ \ 酸素流量(L/分)	12L/分	13L/分	14L/分	15L/分
成人用(20bpm/600ml)	92%	93%	94%	96%

FiO ₂ \ 酸素流量(L/分)	8L/分	9L/分	10L/分	11L/分	12L/分
小児用(20bpm/300ml)	90%	91%	92%	93%	94%

(FiO₂ (吸入酸素濃度) は、呼吸量によっても異なります。)

【使用上の注意】**

1. 本品は 1 患者専用です。患者毎に交換してください。
2. 本品は未滅菌品です。滅菌して使用する場合は、オートクレーブ滅菌及び乾熱滅菌等、材質に影響をおよぼすおそれのある滅菌又は消毒を行わないでください。
3. 使用前に本品を酸素流量計の加湿瓶等に接続し、器具又は接続部からの漏れがなく、マスクから酸素が流出することを必ず確認してください。
4. 酸素チューブおよびリザーバーバッグは折り曲げたり、ねじったりしないでください。閉塞の原因となります。
5. 吸気時にリザーバーバッグがしぼまないように、酸素流量を調節してください。
6. 酸素使用中は発火物を近づけないでください。(引火、爆発のおそれがあります)
7. 本品を加湿瓶等から外す場合は、酸素チューブを持たずコネクタを持って取り外してください。
8. 酸素チューブ内に結露した水分が溜まる場合がありますので注意してください。
9. 本品の使用中に発疹等が生じた場合は、直ちに使用を中止し医師の指示に従ってください。

【保管方法及び有効期間等】**

■貯蔵・保管方法

浸水に注意し、高温多湿・直射日光を避けて保管してください。

■使用期限

製造後 3 年以内 (使用期限内であっても破損・変色等が発生した時点で廃棄してください)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 中村医科工業株式会社

製造業者: GaleMed Limited Taipei Branch/台湾