

機械器具（06）呼吸補助器
管理医療機器 ベンチュリマスク（JMDN:35175000）

ベンチュリーマスクシリーズ

再使用禁止

蛇腹管 NK-6001/NK-6002

【禁忌・禁止】*

本品は1患者専用のディスポーザブル製品です。
再使用はしないこと。

【使用上の注意】

1. 本品は1患者専用です。患者毎に交換してください。
2. 本品を曲げたりねじったりしないでください。

【形状・構造及び原理等】**

■形状



【保管方法及び有効期間等】**

■保管方法

浸水に注意し、高温多湿・直射日光を避けて保管してください。

■使用期限

製造後3年以内（使用期限内であっても破損・変色等が発生した時点で廃棄してください）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：中村医科工業株式会社

製造業者：GaleMed Limited Taipei Branch/台湾

■組成・種類

商品コード	色	サイズ	材質
NK-6001	乳白色	内径：φ22 長さ：30m	エチレン酢酸ビニル
NK-6002	青		アセテート（EVA）樹脂

【使用目的又は効果】

■使用目的

ベンチュリーマスクシリーズ用回路

【使用方法等】**

1. 本品を箱から引き出し、ゴミ・汚れ・破損等がないことを確認してください。
2. 蛇腹管は15cmごとに分節（カフ）があります。分節ごとに任意に切断して使用してください。