

機械器具（06）呼吸補助器
管理医療機器 ベンチュリマスク（JMDN:35175000）

ベンチュリーマスクシリーズ

再使用禁止

蛇腹管 **ID-6001/ID-6002

【禁忌・禁止】

本品は1患者専用のディスポーザブル製品です。
再使用はしないこと。

【使用上の注意】

1. 本品は1患者専用です。患者毎に交換してください。
2. 本品を曲げたりねじったりしないでください。

**【形状・構造及び原理等】

■形状



*【保管方法及び有効期間等】

■保管方法

浸水に注意し、高温多湿・直射日光を避けて保管してください。

■使用期限

製造後3年以内（使用期限内であっても破損・変色等が発生した時点で廃棄してください）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アイデアル・メディカル株式会社

製造業者：GaleMed Limited Taipei Branch

■組成・種類

商品コード	色	サイズ	材質
ID-6001	乳白色	内径：φ22 長さ：30m	エチレン酢酸ビニル
ID-6002	青		アセテート（EVA）樹脂

【使用目的又は効果】

■使用目的

ベンチュリーマスクシリーズ用回路

*【使用方法等】

1. 本品を箱から引き出し、ゴミ・汚れ・破損等がないことを確認してください。
2. 蛇腹管は15cmごとに分節（カフ）があります。分節ごとに任意に切断して使用してください。