

機械器具 (32) 医療用吸引器
管理医療機器 手動式可搬型吸引器（JMDN：36616010）

再使用禁止

スマイルバッグ™ **ID-1411


【警告】

- チューブ内径より大きなものは吸引できません。

【禁忌・禁止】

- 粘性の高いものは吸引しないこと。
[詰まりの原因となります]
- 吸引チューブの先端を傷口にあてないこと。
[患者体内血液の吸引防止]
- 本品は 1 患者専用のディスポーザブル製品です。
再使用はしないこと。

*【形状・構造及び原理等】

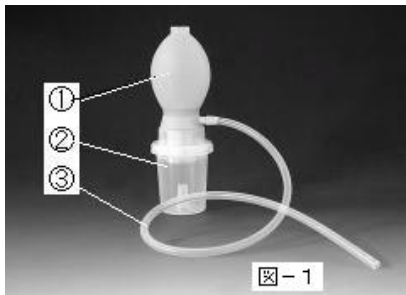

■組成

番号	名 称	材 質
①	バルブ球	シリコンゴム
②	吸引ボトル	ポリプロピレン樹脂
③	吸引チューブ	シリコンゴム

■作動・動作原理

バルブ球を握る（圧迫する）と、排気口からバルブ球の空気が排出され、手を離すとバルブ球及び吸引ボトル内が陰圧となります。その結果、吸引チューブ先端に吸引力が発生しバルブ球を繰り返し操作して異物等を吸引します。

【使用目的又は効果】

■性能

吸 引 圧：＜20 KPa
吸引ボトル内容量：50 ml

■使用目的

気道確保を実行する直前に、口腔内の異物・血液等を除去するために使用します。

*【使用方法等】


■使用方法

- 本品を箱から取り出し、ゴミ・汚れ・損傷等がないことを確認してください。
- 口腔内の異物等に吸引チューブの先端をあてて、バルブ球を握りながら（圧迫しながら）吸引します。（図-2 参照）



*【取扱上の注意】

- バルブ球、吸引ボトル及び吸引チューブの各接続部に漏れないようにしっかりと接続してください。
- 吸引チューブは、チューブ先端の横孔（矢印部）のある方が患者の口腔に入るようにします。（図-3 参照）
- 吸引ボトル内の異物等が半分ほど溜まりましたら除去してください。

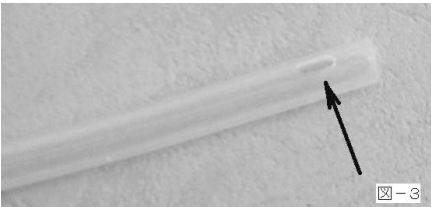

*【保管方法及び有効期間等】

■保管方法

浸水に注意し、高温多湿・直射日光を避けて保管してください。

■使用期限

製造後 3 年以内（使用期限内であっても破損・変色等が発生した時点で廃棄してください）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アイデアル・メディカル株式会社
製造業者：GaleMed Limited Taipei Branch