

アックスピン


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

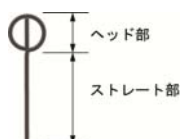

種類	全長	ヘッド部	ストレート部
赤	12.5mm	3.5mm	9mm
緑	15.5mm	3.5mm	12mm
青	17.5mm	3.5mm	14mm

(数値はすべて±0.5mm)

2. 構造

0.3 mmのニッケル線にナイロン繊維を電気植毛したものを、上図のように曲げ加工する。

3. 原理

本品に植毛されている親水性のフロッキーが寒天と絡まり、寒天の保持材となる。

【使用目的、効能又は効果】

1. 使用目的

寒天・連合印象における、ポスト印象採得の際に寒天のちぎれや歪みを防止するための、印象採得補強材です。

【品目仕様等】

1. 外観

ヘッド部に円形の崩れがなく、ストレート部に曲がりがなく、全体に汚れ、キズなどがなく指定の形状、指定の色であること。

2. 寸法

上記形状欄に記載の寸法に対して、全て±0.5mm以内であること。

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用方法

- (1) ポストの長さに合わせて、アックスピンを選びます。長さが適当でない場合は、カットして微調整してください。

※上手な使い方

ピンの長さに余裕があるときは、ヘッド部を舌側方向に曲げてお使い下さい。維持力が増します。

- (2) ポストにシリンジの針を奥まで挿入し、寒天を静かに注入しながら、気泡を残さないように針を抜き取ります。

- (3) 先に選んだアックスピンを、寒天を注入したポストに静かに挿入してください。

- (4) アルジネート・トレーを静かに圧接して、そのまま保持します。

- (5) アルジネートの硬化を確認して、ポストの方向に静かにトレーを取り出してください。外れにくい時は、印象材のへりからエアを吹き込むとたやすく外れます。

【使用上の注意】

口腔内での取扱いについては十分に注意をして、落としたりしないでください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 保管方法

直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。

【包装】

アソート 赤・緑・青 各30本入り
赤・緑・青 各90本入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】※

製造販売業者：株式会社ナルコム
住 所：〒384-2107
長野県佐久市蓬田 1251-239
電 話 番 号：0267-51-5155 FAX 0267-58-0577

製造業者：株式会社ナルコム