

機械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器
一般用医療機器 歯科技工用溶接ろう付器 JMDN 70748000



SOARER XR（ソアラ XR）

【警告】

- ・ 加工時、プライヤーには電圧が出力されております。取扱には十分注意すること。火傷、けが、火災の恐れがあります。
- ・ 加工時の火花の飛び散りに十分注意すること。火傷、けが、火災の恐れがあります。
- ・ 装置を使用する場所に揮発性液体や可燃性ガスなどの物質を置かないこと。火災の恐れがあります。

【形状・構造及び原理等】

1. 装置外観図

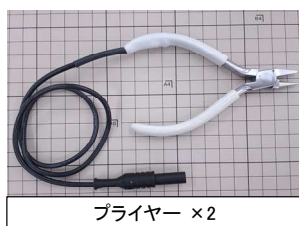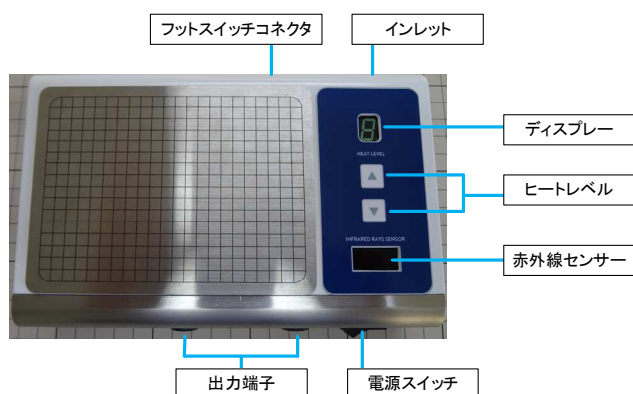

2. 仕様

電源電圧：AC100V-240V 50/60Hz ＊

消費電力：21W（最大）

重 量：約 1.0kg（本体）

本体寸法：180（W）×115（D）×45（H）mm

3. 原理

プライヤーで加工対象のワイヤーをつかみ、加工したい形態へ変化させ、通電電流のジュール熱により、形態を変化させる。

【使用目的又は効果】

歯科用金属等の形状加工、または形状保持。

【使用方法等】

概要となります。詳細については取扱説明書をご覧ください。

プライヤーによるワイヤーの加工：

1. 本体主電源を入れてください。ディスプレイが点灯し

ます。

2. プライヤーを出力端子へ接続します。
3. ワイヤーの種類にあわせて、ヒートレベルボタンを押して出力レベルを設定します。
4. プライヤーでワイヤーをつかみ、曲げた状態を保ちながら本体の赤外線センサーに手をかざし（もしくは、フットスイッチを押下し）、通電させます。（通電するとブザーが鳴ります。）

【使用上の注意】

1. コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V/220V 以外での使用はしないこと。火災・感電の原因になります。
2. 異常が起きたらすぐに電源プラグを抜く。
 - ・ 本体が破損した。
 - ・ 本体内に異物が入った。
 - ・ 異臭がする。
 - ・ 煙が出ている。
 - ・ 異常に熱い。などの異常状態のままにすると、火災・感電の原因になります。
3. ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないこと。感電の原因になります。
4. 機器に水を入れたり、濡らしたりしないでください。内部に水が入った場合はすぐに電源を切って電源プラグを抜き販売店に修理を依頼してください。
5. 電源コードは電源プラグを持って引き抜くこと。
6. 電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。
7. 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないこと。傷んだまま使用しますと、感電・ショート・火災の原因になります。
8. 使用後は電源スイッチを切ること。また、長時間使用しないときは電源プラグをコンセントから引き抜くこと。絶縁劣化による感電や火災の恐れがあります。
9. 作業前には機器や付属品が損傷を受けていないことを確認すること。けがや火傷の恐れがあります。

【保守・点検に係る事項】

カバーを開けない、改造しない。

内部に高電圧部位があるため、感電の原因になります。

また、改造や間違った方法での分解は火災の原因になります。

内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社ナルコム

住 所：〒384-2107

長野県佐久市蓬田 1251 番地 239

電 話 番 号：0267-51-5155 FAX 0267-58-0577

製造業者：株式会社ナルコム

販売業者：

TOMY INTERNATIONAL INC. ®
株式会社 トミーインターナショナル



電話番号：03-3258-2231

<http://www.tomy-ortho.co.jp>

取扱説明書を必ずご参照ください。