

機械器具 04 整形用品
液体包帯(JMDN コード 33584000)一般医療機器
液体包帯冷却用ジェルBS

【形状・構造及び原理等】

(ボトル)

(チューブ)

(小袋)

熱傷の熱を下げる。

【原材料】

主成分:ピュリファイドウォーター

成分:ティーツリーオイル、ジェル化剤

【使用目的又は効果】

本品は、熱傷部分を冷却し、痛みを和らげるものである。
熱傷の種類として、火、熱湯・蒸気、化学薬品、放射線、電気などから生じる熱傷。

【使用方法等】

1. 包装を開封する。
2. 処置部に適量のジェルを塗布する。
3. 必要に応じて、非吸収性の包帯などで処置部を覆う。
4. 必要に応じて、湿った状態を保つため、ジェルを追加で塗布する。

【使用上の注意】

- ・包装などが破損ダメージが見られた場合、使用しないこと。
- ・外用
- ・熱傷用
- ・さらなる治療は、必要に応じて医師の診察を受けて頂くこと。
とくに、痛みの継続、腫れ、赤み、かぶれ、発疹、感染症の症状が続くようならさらなる治療が必要と判断される可能性が高い。

【保管方法及び有効期間等】

乾燥した涼しい直射日光および高温の場所を避けて保管すること。

有効期限は、外箱か包装上に表示。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
南開通商株式会社
電話 (03) 5687-3644

製造元
Burnshield(Pty)Ltd
国名: 南アフリカ共和国