


機械器具 54 医療用捲綿子

医療用捲綿子(JMDN コード 10172000) 一般医療機器

捲綿子

【形状・構造及び原理等】

1. 本製品はステンレス鋼で、形状は先端が捲綿に適した針状又は鉤状の形状になっている。
2. 形状・構造(代表例)

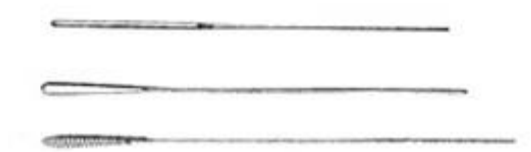

- 3) 洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。
- 4) 洗浄後は、腐食防止のため、直ちに乾燥すること。
- * 5) 点検後、セット・包装をし、高圧蒸気滅菌を推奨する。
なお、滅菌のためのセット・包装にあたっては、
ラチェット部等の可動部は開放するなど、確実に滅菌
できるように配慮すること。
- 6) 強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させる
おそれがあるので、使用を避けること。
金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器具の表面
が破損するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。

3. 種類

- ①耳用 ②鼻用 ③子宮用など

4. 原理

持ち手部と軸の先端に薬剤を塗布するため、先端部に針状又は鉤状の形状を有し、捲綿に適した構造である。

****[製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等]**
製造販売業者
南開通商株式会社
電話 (03) 5687-3644

*【使用目的又は効果】

身体の一部および体内に薬剤を塗布、あるいは治療する際に使用。

*【使用方法等】

1. 本品は未滅菌ですので、使用前に洗浄・滅菌されていることを確認して使用すること。
2. 本品の性能性及び外観に異常がないことを確認して使用すること。
3. 先端部を開口部に挿入し、ハンドルを握ると先端が開き、緩めると閉じる。

*【保管方法及び有効期間等】

1. 保管は、高温・多湿を避け、腐食を防ぐために
保管期間にかかわらず乾燥した清潔な場所に保管
すること。水濡れは絶対に避けること。

【保守・点検に係る事項】

* 1. 洗浄・消毒

- 1) 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために洗浄・消毒すること。
- 2) 洗浄装置(超音波洗浄装置)で洗浄するときは、刃物同士接触して刃先を破損することがないように注意すること。
また、ラチェット部等の稼働部分は開放して、汚れが落ちやすいようにバスケット等に収納すること。