

メイラ(肘頭ガイド)

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- 他メーカーの中空スクリューと併用しないこと。[相互作用の項参照]

【形状・構造等】


1. 組成

ステンレス鋼

2. 形状・構造

本添付文書に該当する製品の製品名、カタログ番号、サイズ等については、包装表示ラベル又は製品の記載を確認すること。

(1) 肘頭ガイド

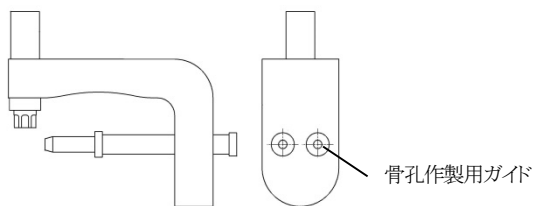

カタログ番号:504B-006

【使用目的又は効果】

本品は、肘頭骨折における骨接合術に用いる。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 肘頭の近位側に中空スクリューを挿入します。
- 中空スクリューを 3/4 ほど挿入した時点で、肘頭ガイドを中空スクリューとドライバーの間に挿入します。
- 肘頭ガイドの骨孔作製用ガイドに K-Wire を入れます。
- スクリューをドライバーで徐々に回し入れながら、K-Wire を肘頭内に入れ骨孔を作製します。
- 最初に遠位骨片に入れておいた軟鋼線を入れ 8 の字に締結する。

2. 組み合わせて使用する医療機器

当該機器に対応する中空スクリューは下記のとおりである。(本品以外)

品名	カタログ番号	販売名/承認番号
6.5mm キャニューレイトド・ キャンセラシップスクリュー	005A-014-035~ 005A-014-120	NRS チタンキャニューレイトドスクリュー /20700BZZ00125000
5.5mm キャニューレイトド・ キャンセラシップスクリュー	005A-013-035~ 005A-013-120	

【使用上の注意】

1. 使用前

本製品は未滅菌の状態で供給されるので、使用前には「日本薬局方」に定める「高圧蒸気滅菌法」に従い、滅菌すること。

2. 使用注意

- 使用時に必要以上の力を加えないこと。[折損、曲がり等の原因となる]
- 指定された当社の中空スクリューを使用すること。

3. 相互作用

併用禁忌・禁止(併用しないこと)

医療機器の 名称等	臨床症状 措置方法	機序・危険因子
他メーカーの中 空スクリュー	中空スクリューの破損 の危険性が高まる恐 れがある。	サイズが正確に適合 せず、正しく器具が使 用できない。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法:洗浄後、高温、多湿、直射日光をさけ常温で保管

*【保守・点検に係る事項】

- 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、感染防止のために洗浄、消毒すること。
- 洗浄、消毒、殺菌等に用いる洗剤は、医療用などの洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- 強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は、本品を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
- 金属たわし、クレンザー(磨き粉)は、本品の表面及び摺動部が損傷するので、付着物除去及び洗浄時に使用しないこと。
- 洗浄装置(超音波洗浄装置等)を使用するときは、鋭利部同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- 超音波洗浄装置を使用するときは、洗浄時間、手順等は使用する装置の取扱説明書を遵守し、器具の隙間部に異物がないことを確認できるまで洗浄すること。
- 中空構造部分がある器具は、中空部に異物がないことを確認すること。
- 洗浄後は腐食防止のため直ちに乾燥すること。
- 使用後には必ず点検を実施し、傷及び変形等の異常を発見した際には、必ず《本品の問い合わせ先》へその旨を連絡し、その指示に従うこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

《製造販売業者》

 **メイラ 株式会社**

TEL 0575-24-7059

《製造業者》

メイラ株式会社

《本品の問い合わせ先》

メイラ株式会社 メディカル事業部 業務グループ

TEL 052-459-1277(直通)/FAX 052-459-1282