

メイラ(クジラプレート用器械)

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- 他メーカーのインプラント材料と併用しないこと。[相互作用の項参照]

【形状・構造及び原理等】

1. 組成

ステンレス鋼

2. 形状・構造

本添付文書に該当する製品の製品名、カタログ番号、サイズ等については、包装表示ラベル又は製品の記載を確認すること。

(1) テンプレート



カタログ番号	全長 (mm)	高さ (mm)	対応製品
031B-001-01	55	29.5	クジラプレート (031A-001-01)
031B-001-02	60	37.5	クジラプレート (031A-001-02)
031B-001-03	66.5	37.5	クジラプレート (031A-001-03)

(2) ドリルガイド



カタログ番号	スリーブ長 (mm)	穴径 (mm)	対応製品
509B-014	40mm	2.8mm	クジラプレート

【使用目的又は効果】

「クジラプレート」を用いる整形外科手術用器具として使用する。

【使用方法等】

1. 使用方法

- テンプレートを患部にあて、最適なプレートサイズと位置を確認する。
- インプラント(クジラプレート)の穴部分から骨格部にスクリューを挿入するため、骨格部にスクリュー用のドリル穴をあける際のガイドとして使用する。

2. 組み合わせて使用する医療機器

当該機器に対応するプレートは下記のとおりである。(本品以外)

品名	カタログ番号	販売名/承認番号
クジラプレート	031A-001-01	クジラプレート /21500BZZ00663000
	031A-001-02	
	031A-001-03	

【使用上の注意】

1. 使用前

本製品は未滅菌の状態では供給されるので、使用前には「日本薬局方」に定める「高圧蒸気滅菌法」に従い、滅菌をすること。

2. 使用注意

- 使用時に必要以上の力を加えないこと。[折損、曲がり等の原因となる]

3. 相互作用

併用禁忌・禁止(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状措置方法	機序・危険因子
他メーカーのインプラント及び器具	インプラント及び器具の破損の危険性が高まる恐れがある。	サイズが正確に適合せず、正しく器具が使用できない。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法: 洗浄後、高温、多湿、直射日光をさけ常温で保管

*【保守・点検に係る事項】

- 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、感染防止のために洗浄、消毒すること。
- 洗浄、消毒、殺菌等に用いる洗剤は、医療用などの洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
- 強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は、本品を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
- 金属たわし、クレンザー(磨き粉)は、本品の表面が損傷するので、付着物除去及び洗浄時に使用しないこと。
- 洗浄装置(超音波洗浄装置等)を使用するときは、鋭利部同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- 超音波洗浄装置を使用するときは、洗浄時間、手順等は使用する装置の取扱説明書を遵守し、器具の隙間部に異物がないことを確認できるまで洗浄すること。
- 中空構造部分がある器具は、中空部に異物がないことを確認すること。
- 洗浄後は腐食防止のため直ちに乾燥すること。
- 使用後には必ず点検を実施し、傷及び変形等の異常を発見した際には、必ず《本品の問い合わせ先》へその旨を連絡し、その指示に従うこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

《製造販売業者》  **メイラ株式会社**

TEL 0575-24-7059

《製造業者》

メイラ株式会社

《本品の問い合わせ先》

メイラ株式会社 メディカル事業部 業務グループ

TEL 052-459-1277(直通)/FAX 052-459-1282