

メイラ(ガイドピンガイド)

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- 当該手術器械には当社指定のガイドピンを用い、他社製品は使用しないこと。[相互作用の項参照]

【形状・構造及び原理等】


1. 組成

ステンレス鋼

2. 形状・構造

本添付文書に該当する製品の製品名、カタログ番号、サイズ等については、包装表示ラベル又は製品の記載を確認すること。

- 上杉ガイド

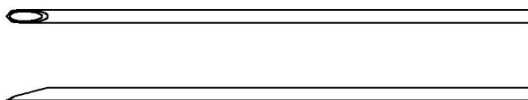

カタログ番号 504B-009-28

【使用目的又は効果】

ガイドピン刺入時の周辺組織の損傷防止を目的とする。

*【使用方法等】

1. 使用方法

- ガイドピン刺入位置に、本品「上杉ガイド」を刺入する。
- 本品「上杉ガイド」の中空部に沿って、ガイドピンを刺入する。

2. 組み合わせて使用する医療機器

当該機器と併用するガイドピンは下記のとおりである。(本品以外)

品番	販売名/認証・届出番号
003A-014-28230	メイラ(ガイドピン)/ 21B1X00003000007
003A-015-28230	
003A-014-28230	
003A-015-28230	
003A-016-28300	
M003A-014-28340	メイラ ガイドピン(滅菌)/ 302AGBZX00115000

【使用上の注意】

1. 使用前

本製品は未滅菌の状態で供給されるので、使用前には「日本薬局方」に定める「高圧蒸気滅菌法」に従い、滅菌すること。

2. 使用注意

- 穿孔時に必要以上の力を加えないこと。[折損、曲がり、ガイドピンの固着等の原因となる]

3. 相互作用

併用禁忌・禁止 (併用しないこと)

医療機器の 名称等	臨床症状 措置方法	機序・危険因子
・他メーカー のガイドピン 及び K ワイ ヤー	・当該機器との固着、摩擦 による発熱、破損等の有害 事象が発生する可能性が ある。	・当該機器との固 着、磨耗粉の発 生、当該機器の ガイド性の低下

【保管方法及び有効期間等】

保管方法: 洗浄後、高温、多湿、直射日光をさけ常温で保管

【保守・点検に係る事項】

- 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、感染防止のために洗浄、消毒すること。
- 洗浄、消毒、殺菌等に用いる洗剤は、医療用などの洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- 強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は、本品を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
- 金属たわし、クレンザー(磨き粉)は、本品の表面が損傷するので、付着物除去及び洗浄時に使用しないこと。
- 洗浄装置(超音波洗浄装置等)を使用するときは、鋭利部同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- 超音波洗浄装置を使用するときは、洗浄時間、手順等は使用する装置の取扱説明書を遵守し、器具の隙間部に異物がないことを確認できるまで洗浄すること。
- 中空構造部分がある器具は、中空部に異物がないことを確認すること。
- 洗浄後は腐食防止のため直ちに乾燥すること。
- 使用後には必ず点検を実施し、傷及び変形等の異常を発見した際には、必ず《本品の問い合わせ先》へその旨を連絡し、その指示に従うこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

《製造販売業者》

 **メイラ** 株式会社

TEL 0575-24-7059

《製造業者》

メイラ株式会社

《本品の問い合わせ先》

メイラ株式会社 メディカル事業部 業務グループ

TEL 052-459-1277 (直通) / FAX 052-459-1282