

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 骨手術用器械 70962001
メイラ(橈骨用ボーンタンプ)

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- ・適応部位以外に使用しないこと。[折損、曲がり等の原因となる]

【形状・構造及び原理等】

1. 組成

ステンレス鋼

2. 形状・構造

本添付文書に該当する製品の製品名、カタログ番号、サイズ等については、包装表示ラベル又は製品の記載を確認すること。

- (1) 品 名: 橈骨用ボーンタンプ、規 格: 15°



カタログ番号: 533B-100-15

- (2) 品 名: 橈骨用ボーンタンプ、規 格: 45°



カタログ番号: 533B-100-45

- (3) 品 名: 橈骨用ボーンタンプ、規 格: 75°




カタログ番号: 533B-100-75

【使用目的又は効果】

骨折整復固定術用の器具として使用する。

【使用方法等】

橈骨用ボーンタンプで、陥没した骨折片の整復を行う。

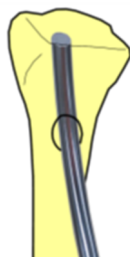

＜使用例＞

陥没した橈骨関節面を、橈骨用ボーンタンプを用いて、上方に押し上げ整復を行う。

【使用上の注意】

1. 使用前

本製品は未滅菌の状態で供給されるので、使用前には「日本薬局方」に定める「高圧蒸気滅菌法」に従い、滅菌をすること。

2. 使用注意

- ・使用時に必要以上の力を加えないこと。[折損、曲がり等の原因となる]

【保管方法及び有効期間等】

保管方法: 洗浄後、高温、多湿、直射日光をさけ常温で保管

＊【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、感染防止のために洗浄、消毒すること。
2. 洗浄、消毒、殺菌等に用いる洗剤は、医療用などの洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は、本品を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
4. 金属たわし、クレンザー(磨き粉)は、本品の表面が損傷するので、付着物除去及び洗浄時に使用しないこと。
5. 洗浄装置(超音波洗浄装置等)を使用するときは、鋭利部同士が接触して損傷することがないように注意すること。
6. 超音波洗浄装置を使用するときは、洗浄時間、手順等は使用する装置の取扱説明書を遵守し、器具の隙間部に異物がないことを確認できるまで洗浄すること。
7. 中空構造部分がある器具は、中空部に異物がないことを確認すること。
8. 洗浄後は腐食防止のため直ちに乾燥すること。
9. 使用後は必ず点検を実施し、傷及び変形等の異常を発見した際には、必ず《本品の問い合わせ先》へその旨を連絡し、その指示に従うこと。

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

《製造販売業者》  **メイラ 株式会社**

TEL 0575-24-7059

《製造業者》 メイラ株式会社

《本品の問い合わせ先》

メイラ株式会社 メディカル事業部 業務グループ

TEL 052-459-1277(直通) / FAX 052-459-1282