

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 骨手術用器械 70962001
(一般医療機器 手術用ネジ回し 33968000)

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器、穿孔器
(一般医療機器 ガイド 37150000)

NRS 骨手術器械

再使用禁止(ガイドピンのみ)

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- ガイドピン再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 組成

ステンレス鋼、ペークライト

2. 形状・構造

本添付文書に該当する製品の製品名、カタログ番号、サイズ等については、包装表示ラベル又は製品の記載を確認すること。

(1) ボックスレンチ



カタログ番号:009B-001

(2) ドライバー



カタログ番号:009B-002

(3) ガイドピン[再使用禁止]

カタログ番号	外径	全長	ねじ長さ	備考
003A-014-20230	2.0mm	200mm	12mm	ねじ付き

【使用目的又は効果】

「NRS 骨囊腫螺子」の手術用器具として使用する。

【使用方法等】

1. 使用方法(詳細な手術手技はカタログを参照のこと)

- 2.0mm ガイドピンを患部に刺入し、ボックスレンチを使用して骨囊腫螺子(皮質刺入用螺子)を挿入する。挿入された骨囊腫螺子(皮質刺入用螺子)を通して骨内液の採取が可能となる。
- 骨囊腫螺子(皮質刺入用螺子)によって成形されたねじ溝に、ドライバーを使用して骨囊腫螺子(持続減圧用螺子)を挿入する。挿入された骨囊腫螺子(持続減圧用螺子)の穴より、患部の持続的減圧が得られる。

2. 組み合わせて使用する医療機器

当該機器に対応するスクリューは下記のとおりである。(本品以外)

品名	品番	販売名/承認番号
骨囊腫螺子 (皮質刺入用螺子)	009A-001	NRS 骨囊腫螺子/ 20700BZZ01021000
骨囊腫螺子 (持続減圧用螺子)	009A-002-015	
	009A-002-023	

3. 使用方法に関連する使用上の注意

- スクリューを挿入、抜去する際、ボックスレンチ、ドライバーの先端は、スクリューにしっかりと嵌め込み、スクリューと同軸の状態でも回転させること。
[スクリューに回転トルクが完全に伝わらず、折損、曲がり等の原因となる]
- ガイドピンを刺入する際、イメージインテンシファイア等を用いて、ガイドピンが正しい方向、位置に進入していくことを頻繁に確認すること。[ガイドピンが意図しない方向に進み、周囲の組織を破壊する恐れがある]
- 中空内に骨碎片(いわゆる骨屑)が集積しないように、中空構造をもつ器具はこれを術中に除去すること。

【使用上の注意】

1. 使用前

本製品は未滅菌の状態で供給されるので、使用前には「日本薬局方」に定める「高圧蒸気滅菌法」に従い、滅菌すること。

2. 使用注意

- 使用時に必要以上の力を加えないこと。[折損、曲がり等の原因となる]

3. 不具合・有害事象

(1) その他の不具合

- ガイドピン・キャニューレイトドリル等の手術器械の破損
(骨が硬い場合やこれが予め予想される場合には、無理な操作は行わないこと。)

(2) その他有害事象

- 体内遺残
(ガイドピン・キャニューレイトドリル等の手術器械の破損により発生する場合がある。)
- 手術時間の延長
(体内遺残等の有害事象対応や破損に伴う予備器械準備により発生する場合がある。)

【保管方法及び有効期間等】

保管方法: 洗浄後、高温、多湿、直射日光をさけ常温で保管

*【保守・点検に係る事項】

- 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、感染防止のために洗浄、消毒すること。
- 洗浄、消毒、殺菌等に用いる洗剤は、医療用などの洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- 強アルカリ/強酸性洗剤/消毒剤は、本品を腐食させる恐れがあるので使用しないこと。
- 金属たわし、クレンザー(磨き粉)は、本品の表面が損傷するので、付着物除去及び洗浄時に使用しないこと。
- 洗浄装置(超音波洗浄装置等)を使用するときは、鋭利部同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- 超音波洗浄装置を使用するときは、洗浄時間、手順等は使用する装置の取扱説明書を遵守し、器具の隙間部に異物がないことを確認できるまで洗浄すること。
- 中空構造部分がある器具は、中空部に異物がないことを確認すること。
- 必要に応じて分解し、洗浄すること。
- 洗浄後は腐食防止のため直ちに乾燥すること。
- 使用後には必ず点検を実施し、傷及び変形等の異常を発見した際には、必ず《本品の問い合わせ先》へその旨を連絡し、その指示に従うこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

《製造販売業者》 **メイラ 株式会社**
TEL 0575-24-7059
《製造業者》 メイラ株式会社

《本品の問い合わせ先》

メイラ株式会社 メディカル事業部 業務グループ
TEL 052-459-1277(直通)/FAX 052-459-1282