

機械器具 58 整形用機械器具		
一般医療機器	骨手術用器械	70962001
(一般医療機器	手術用ドリルビットガイド	35095000)
(一般医療機器	手術用ドリルビット	32390000)
(一般医療機器	手術用ネジ回し	33968000)
機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器、穿孔器		
(一般医療機器	ガイド	37150000)

NRS 骨手術器械

再使用禁止(ガイドピンのみ)

【禁忌・禁止】

<使用方法>

・ガイドピン再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 組成

ステンレス鋼

2. 形状・構造

本添付文書に該当する製品の製品名、カタログ番号、サイズ等については、包装表示ラベル又は製品の記載を確認すること。

(1) キャニューレイティドリル



カタログ番号	全長	ドリル外径	穴径
500B-004-23090H	90mm	2.3mm	1.3mm

(2) 六角ドライバー



カタログ番号	六角二面幅	全長	シャフト径	穴径
503B-001-020	2.0mm	175mm	5.0mm	1.3mm

(3) ガイド



カタログ番号	穴径	ガイド長
504B-003-12	1.3	40

(4) ガイドピンデプスゲージ



カタログ番号	全長	外径	穴径	規格
517B-001	150mm	10mm	1.3mm	D.T.J. Screw

(5) ガイドピン[再使用禁止]



カタログ番号	外径	全長	備考
003A-015-12150	1.2mm	150mm	ねじ無し

【使用方法等】

1. 使用方法

1)ガイドを骨格部にあてがい、ガイドピンを刺入する。

2)ガイドピンデプスゲージでガイドピン刺入深度を測定し、適切な長さのスクリューを選定する。

3)六角ドライバーを使用してスクリューを骨格部に挿入する。

2. 組み合わせて使用する医療機器

当該機器に対応するスクリューは下記のとおりである。(本品以外)

品名	カタログ番号	販売名/承認番号
DTJ スクリュー	030A-032-016～ 030A-032-040	DTJ スクリュー /21200BZZ00606000

3. 使用方法に関連する使用上の注意

- 患部に複数のインプラント(手術器械を含む)を挿入する際、インプラント(手術器械を含む)同士が意図しない状態で接触すると、接触部が破損(スクリューの折損、スクリュースレッドの剥がれ等)を起こす恐れがあるのでイメージインテンシファイア等で確認しながら、慎重に行うこと。
- 万ーインプラント(手術器械を含む)の破損が生じた際は、創を十分に観察し、破損片を確実に除去すると共に、十分な洗浄を行うこと。
- 骨が硬い場合やこれが予め予想される場合には、スクリュー挿入前にキャニューレイティドリルで中枢側の皮質骨のみドリリングを行うこと。[オーバートルクにより、スクリューが折損する危険性がある]
- 骨が硬い場合やこれが予め予想される場合でも、中枢側の皮質骨を超えドリリングは実施しないこと。[スクリューの固定力が著しく低下し、事故抜去等が発生する場合があります。]
- ガイドピンを使用してキャニューレイティドリルにてドリリングする際、ガイドピンが曲がっていない状態でガイドピンとドリルが同軸となる様にドリリングすること。[キャニューレイティドリルの先端がガイドピンに干渉し、ガイドピン、キャニューレイティドリルの異常磨耗、折損の原因となる]
- ガイドピンを刺入する際、イメージインテンシファイア等を用いて、ガイドピンが正しい方向、位置に進入していくことを頻繁に確認すること。[ガイドピンが意図しない方向に進み、周囲の組織を破壊する恐れがある]
- 中空内に骨碎片(いわゆる骨屑)が集積しないように、中空構造をもつ器具はこれを術中に除去すること。
- ガイドピン、キャニューレイティドリルを電動式、エア式ドリルに装着する際、ガイドピン、キャニューレイティドリルの軸がずれないように装着すること。
- ガイドピン及びキャニューレイティドリルを使用する際、ガイドピン、キャニューレイティドリル等を必要以上の力で押しつけないこと。[ガイドピン、キャニューレイティドリルの異常磨耗、折損の原因となる]
- 骨が硬い場合やこれが予め予想される場合には、ガイドピン、キャニューレイティドリル等の無理なドリリングは行わないこと。[ガイドピン、キャニューレイティドリルの異常磨耗、折損の原因となる]
- ドリリングする際、定期的に骨屑を除去すること。
- ドリリング中、方向の変更や、ガイドピン、キャニューレイティドリルがたわむような力を加えないこと。[ガイドピン、キャニューレイティドリルの異常磨耗、折損の原因となる]
- ガイドピン、ドリルの切れが悪いと感じた場合は、新しいガイドピン、キャニューレイティドリルと交換すること。
- スクリューを挿入、抜去する際、六角ドライバーの先端六角部は、スクリューの六角穴の一番奥まで嵌め込み、スクリューと同軸となる様に回転させること。[スクリューに回転トルクが完全に伝わらず、折損、曲がり等の原因となる]

DTJ スクリュー用

1/2

K-011_ver10.0

*【使用上の注意】

1. 使用前

本製品は未滅菌の状態で供給されるので、使用前には「日本薬局方」に定める「高圧蒸気滅菌法」に従い、滅菌をすること。

2. 使用注意

- ガイドピン及びキャニューレイトドリル以外の手術器械においても使用時に必要以上の力を加えないこと。[折損、曲がり等の原因となる]

3. 不具合・有害事象

(1) その他の不具合

- ガイドピン・キャニューレイトドリル等の手術器械の破損
(骨が硬い場合やこれが予め予想される場合には、無理な操作は行わないこと。)

(2) その他有害事象

- 体内遺残
(ガイドピン・キャニューレイトドリル等の手術器械の破損により発生する場合がある。)
- 手術時間の延長
(体内遺残等の有害事象対応や破損に伴う予備器械準備により発生する場合がある。)

【保管方法及び有効期間等】

保管方法: 洗浄後、高温、多湿、直射日光をさけ常温で保管

*【保守・点検に係る事項】

- 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、感染防止のために洗浄、消毒すること。
- 洗浄、消毒、殺菌等に用いる洗剤は、医療用などの洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は、本品を腐食させる恐れがあるので使用しない。
- 金属たわし、クレンザー(磨き粉)は、本品の表面が損傷するので、付着物除去及び洗浄時に使用しない。
- 洗浄装置(超音波洗浄装置等)を使用するときは、鋭利部同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- 超音波洗浄装置を使用するときは、洗浄時間、手順等は使用する装置の取扱説明書を遵守し、器具の隙間部に異物がないことを確認できるまで洗浄すること。
- 中空構造部分がある器具は、中空部に異物がないことを確認すること。
- 洗浄後は腐食防止のため直ちに乾燥すること。
- 使用後には必ず点検を実施し、傷及び変形等の異常を発見した際には、必ず《本品の問い合わせ先》へその旨を連絡し、その指示に従うこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

《製造販売業者》  **メイラ 株式会社**

TEL 0575-24-7059

《製造業者》 メイラ株式会社

《本品の問い合わせ先》

メイラ株式会社 メディカル事業部 業務グループ

TEL 052-459-1277(直通)／FAX 052-459-1282