

類別：器具器械（42） 医療用剥離子
 一般的名称：歯科用起子及び剥離子 一般医療機器(JMDNコード70683000)
 販売名：石井式 角度可変 骨膜剥離子

【禁忌・禁止】

1. 電気メス等を併用しないで下さい。
感電、火傷の危険があります。
2. 目的以外の使用禁止
本製品を以下の使用目的以外に使用しないで下さい。
目的以外での使用は思わぬ事故を招く恐れがあります。
3. 二次加工 修理 分解の禁止
本製品に曲げ、切削、打刻(刻印)等の改造(二次的加工)を行わないで下さい。器具の折損を招く恐れがあります。適切な指示なく修理、分解はしないで下さい。器具の折損、変形を招く恐れがあります。

【形状・構造及び原理等】

1.原材料/材質：ステンレス

2.形状・構造・原理

本製品の形状は右のとおり。
 (代表的写真)
 本品は骨膜・粘膜などを剥離する先端部とハンドル部で構成される。ハンドル部のスイッチを操作することによりロックが解除され、先端部の角度を5段階に変えることができる。この機能により口腔の奥の骨膜や粘膜も効率よく剥離することができる。



【使用目的、効能または効果】

口腔内手術で骨膜、粘膜等の組織の剥離または口腔内の補綴物、異物等の除去に用いる。電動式ではない。

【使用方法】

- 1.ハンドル部のスイッチを引きロックを解除する。
- 2.その状態を維持し先端を指で最適な角度の位置にする。(5段階)
- 3.スイッチを放すと再びロックされる。その際「カチッ」という音がして確実にロックされているかを確認する。
- 4.先端部で口腔内の骨膜や粘膜などを剥離する。

【使用上の注意】

- 1.重要な基本的注意
本品をクロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)患者、又はその疑いのある患者に使用した場合は、クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)に関する国内規制及びガイドライン等を遵守して下さい。
- 2.先端部に割れやささくれなどが生じたものは患者の口腔内を傷つける恐れがあります。また滅菌時に雑菌が残留する恐れがあります。このような状態のものは直ちに使用を中止して下さい。
- 3.折損、変形等の原因になりますので、**本製品に必要以上の力を加えないで下さい。特に先端の角度可変部は精密な構造のため十分ご注意ください。**

＜相互作用 他の医療機器との併用に関する事＞

電気メス等を併用しないで下さい。感電、火傷の危険があります。

【保管方法及び有効期間等】

滅菌済の本製品を貯蔵・保管するにあたっては再汚染を防ぐため、清潔な場所に保管するとともに有効保管期間の管理をして下さい。

【保守・点検に係る事項】 使用者による保守点検事項

1. 洗浄・消毒、滅菌
 - 1) 本製品は未滅菌なので、使用前に必ず洗浄・消毒・滅菌をして下さい。出荷時に防錆のため、ごく少量の油分が塗布されています。初回の滅菌前に必ず医療器具油分除去用洗剤で洗浄して下さい。
 - 2) 本製品はオートクレーブ滅菌・ガス滅菌が可能です。

例. ISO高圧蒸気滅菌条件(ISO/TS 17665 -2)

滅菌温度	保持時間
121° C	15分
126° C	10分
134° C	3分

参考文献「医療現場における滅菌保証のガイドライン 2015」

一般社団法人 日本医療機器学会

- 3) 貯蔵・保管にあたっては、洗浄をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず直ちに乾燥をして下さい。
- 4) 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄、消毒、滅菌を行って下さい。
- 5) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選び、その適正濃度と取扱い方法を守って下さい。中性洗剤を推奨します。
- 6) 洗浄装置(超音波洗浄装置、ウォッシャー・ディスイنفクター)で洗浄するときには、他の製品と接触して損傷することがないように注意して下さい。
- 7) 強アルカリ・強酸性洗剤・消毒剤は、製品を腐食させる恐れがあるので使用を避けてください。
金属たわし、磨き粉等は、製品の表面が損傷するので使用は避けて下さい。
- 8) 洗剤の残留がないように十分にすすぎ洗いをして下さい。仕上げすすぎには、浄化水(蒸留、脱イオン等)を使用して下さい。
- 9) 洗浄後はエアークリーナーガンなどで可動部周辺の水分をよく吹き飛ばして下さい。
- 10) 洗浄後滅菌前に、部品点数、汚れ、損傷、変形等の異常がないか点検してください。

2.点検

- 1) 使用前には、正常に作動していること、傷や割れがないこと、部品の欠損がないこと、汚れの残留がないことなどを確認してください。
- 2) 使用後は使用前と同様の点検を実施してください。

【主要文献及び文献請求先】

一般社団法人 日本医療機器学会 TEL03-3813-1062

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

株式会社ナミキ・メディカルインストゥルメンツ
 〒132-0035 東京都江戸川区平井7-14-11
 TEL03-3610-0375 FAX03-3610-3777
 E-mail info@namiki-mi.co.jp