

2016年 04月 07日作成 (第1版)

歯09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

Aースナ

【形状・構造及び原理等】

成分: 珪素

形状・構造: 不定形の粒状

原理: 本品適量を被加工物表面に接触させることで研磨効果が得られる。

【使用目的又は効果】

珪素からなる歯科用研磨材

1. 本研磨材は、レジン等の研磨に使用する。
2. 主に歯科補綴物、レジンの仕上げ研磨に用いる研磨材である。

【使用方法等】

(使用方法)

1. 研削機械(レーズ、グラインダー)に装着したブラシ、パフに付着させ、任意の回転数で回転させて被加工物表面に接触させる。
2. 通法によってはカーボランダム等で行ってください。金属床はペーパーコーンで更に面を整えてください。
3. 形態修正後、パフ等に本材を適量付着させ研磨対象物を研磨します。尚、本研磨材は、水などで泥状にして使用する。
4. 作業終了後に、通法により洗浄してください。

(使用方法に関する使用上の注意)

使用の際には必ず研削機械の操作手順に従うこと。

【使用上の注意】

(使用注意)

1. 使用目的以外の目的で使用しないこと。
2. 歯科技工士、歯科医師以外は使用しないこと。

(重要な基本的注意)

1. 万一目に入った場合には、こすらずに直ちに水で十分洗い流してください。
2. 研磨作業の際にはとびちりにより人体への影響を避けるため、防塵マスク等を使用すること。また、目の損傷を防ぐために保護めがねを使用すること。
3. パフ等を使用する場合には、その説明書に表示してある使用上の注意事項を守ること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 水分、直射日光及び腐食性薬剤とその蒸気の暴露をさけて、外圧(物理的負担)及び汚染を受けないように保管すること。
2. 本材は歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【包装】

質量: 1kg/アルミパック

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 中川セラミックス株式会社

住 所 〒558-0023

大阪府大阪市住吉区山之内1丁目17番14号

電 話 番 号 06-6695-3277