

2016年 04月 07日作成 (第1版)

歯09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

## D-36

### 【形状・構造及び原理等】

原材料: 酸化アルミニウム、植物性油脂・樹脂、動物性油脂(魚脂)、青色顔料

形状: 不定形の台型

原理: 本品をブラシ又はパフに付着させ、回転させて技工物に接触させることで物理的に研磨効果が得られる。

### 【使用目的又は効果】

酸化アルミニウム、及び特殊油脂からなる歯科用研磨材

1. 本研磨材は、金パラ合金、高カラットメタル、銀合金等の研磨に使用する。
2. 補綴物等に用いる器材であり、主な用途は金属床、レジン床の最終仕上げ研磨。また研切削力を重視しておりますので、研磨工程の省略、研磨工程の時間短縮を目的とした研磨材である。

### 【使用方法等】

(使用方法)

1. 研削機械(レーズ、グラインダー)に装着したブラシ、パフに付着させ、任意の回転数で回転させて被加工物表面に接触させる。
2. 通法によってはカーボランダム等で行ってください。
3. 形態修正後ロビンソンブラシ、フェルト等に本材を適量付着させ研磨対象物を研磨します。
4. 作業終了後に、通法により洗浄してください。

(使用方法に関する使用上の注意)

本研磨材の回転数は8,000回転から10,000回転ぐらいで研磨します。尚、本研磨材を付着させすぎないように注意してください。くもりが発生します。

### 【使用上の注意】

(使用注意)

1. 使用目的以外の目的で使用しないこと。
2. 歯科技工士、歯科医師以外は使用しないこと。

(重要な基本的注意)

1. 万一目に入った場合には、こすらずに直ちに水で十分洗い流してください。
2. 研磨作業の際にはとびちりにより人体への影響を避けるため、防塵マスク等を使用すること。また、目の損傷を防ぐために保護めがねを使用すること。
4. ブラシ、パフ等を使用する場合には、その説明書に表示してある使用上の注意事項を守ること。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 水分、直射日光及び腐食性薬剤とその蒸気の暴露をさけて、外圧(物理的負担)及び汚染を受けないように保管すること。
2. 本材は歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

### 【包装】

質量: 500g/シュリンクパック

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 製造販売業者  | 中川セラミックス株式会社                       |
| 住 所     | 〒558-0023<br>大阪府大阪市住吉区山之内1丁目17番14号 |
| 電 話 番 号 | 06-6695-3277                       |