

2016年 04月 07日作成 (第1版)

歯09 歯科用研削材料


一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

ウルトラコーン

【形状・構造及び原理等】

形状: 筒状

構造: 研磨材(アランダム)の微粉を接着させた和紙

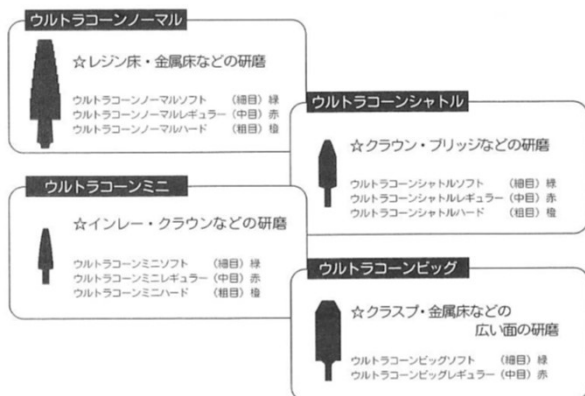

【使用目的又は効果】

歯科技工物製作過程において、レジン、ポリカーボネート樹脂等の表面研磨に用いる研磨研削材料

【使用方法等】

(使用方法)

歯科用駆動装置(モーター、エンジン)のハンドピースに装着し、回転させ、ソフトタッチで被研磨物に押し付けて研磨する。

(使用方法に関する使用上の注意)

1. 本材は十分な強度のあるマンドレールを使用し確実に装着すること。
2. 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
3. 本材は適正使用回転数(10,000r.p.m以下)をこえた場合には、破折して怪我をするおそれがあるので、適性使用回転数を厳守すること。

【使用上の注意】

(使用注意)

1. 本材は、使用目的以外には使用しないこと。
2. 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
3. 本材は長時間連続で使用すると熱を帯びることがあるので、断続的に使用する様に注意すること。
4. 本材は適正使用回転数(10,000r.p.m以下)をこえて使用しないこと。

(重要な基本的注意)

研磨物等の微粉が、目、口等に入らないように保護メガネ、マスク等を着用の上、作業を行うこと。万一、研磨物等の微粉が目に入った場合は直ちに作業を中止し、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 水分、直射日光及び腐食性薬剤とその蒸気の暴露をさけて、外圧(物理的負担)及び汚染を受けないように保管すること。
2. 本材は歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【包装】

紙箱: 100ヶ入、200ヶ入

ビックのみ50ヶ入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 中川セラミックス株式会社

住 所 〒558-0023

大阪府大阪市住吉区山之内1丁目17番14号

電 話 番 号 06-6695-3277