

2016年 04月 07日作成 (第1版)

歯09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000
コットンバフ

【形状・構造及び原理等】

原材料:材質 綿布

形状:円形のバフ

寸法 80Φ×10mm

【使用目的又は効果】

- 1.本バフは、金属、レジンの補綴物の最終仕上げに用いる器材である。
- 2.主として、本品をレーズにセットし、レジン床の樹脂部表面の最終仕上げに用いる。

【使用方法等】

(使用方法)

歯科技工用回転機器(技工用レーズ)に装着し、回転させて、歯科用研磨材を塗りながらソフトタッチで継続的に被研磨物に押し付けて研磨する。

1.レーズへのセット

通法によってレーズへセットしてください。この場合レーズメーカーの取扱説明書に基づいて確実にセットしてください。

2.樹脂系の最終仕上げ研磨

レジン床・スルホン床の場合、本バフの研磨回転数は低速で研磨します。

3.金属の仕上げ研磨

美しい艶が得られます。

(使用方法に関連する使用上の注意)

- 1.本品の取り付けには、十分に留意し確実に取り付けること。
- 2.使用回転数は低速を厳守すること。
- 3.使用前に予備回転を行い振れがないことを確認する。
- 4.けがをすることがあるので、無理な角度、過度の圧力での研磨は避けること。
- 5.金属系・樹脂系双方に使用できますが、バフはそれぞれに使い分けてください。併用されますと樹脂系が黒ずみます。
- 6.本製品は、説明書に記載の用途以外には使用しないこと。

【使用上の注意】

(使用注意)

- 1.本研磨材は、記載の用途以外には使用しないこと。
- 2.歯科技工士、歯科医師以外は使用しないこと。

吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないこと。

- 2.研磨作業を行う際には、目の損傷を防ぐために保護めがねを使用すること。

(重要な基本的注意)

- 1.研磨作業の際には粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 2.研磨作業を行う際には、目の損傷を防ぐために保護めがねを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1.水分、直射日光及び腐食性薬剤とその蒸気の暴露をさけて、外圧(物理的負担)及び汚染を受けないように保管すること。
- 2.本材は歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【包装】

質量:1枚/PP袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 中川セラミックス株式会社

住 所 〒558-0023

大阪府大阪市住吉区山之内1丁目17番14号

電 話 番 号 06-6695-3277