

2016年 04月 07日作成 (第1版)

歯09 歯科用研削材料

一般医療機器 歯科用研削器材 JMDN70908000

シンエイカーボランダムポイント

【形状・構造及び原理等】

形状、構造:ポイント状

作業部: 人造研削材(炭化ケイ素)をガラスで結合した軸付砥石

軸部: 特殊鋼

軸部形式: HP用

原理: 本品をハンドピースグラインダーで回転させ、物理的に接触させることで研削効果が得られる。

種類: #10、#11、#13、#19、#20、#28、#42、#44

【使用目的又は効果】

歯科技工物製作過程において、補綴物の研削に用いる研削器具

【使用方法等】

(使用方法)

研削機械(ハンドピースグラインダー)にて任意の回転数で回転させて被加工物表面に接触させ、対象物を研磨します。

(使用方法に関する使用上の注意)

- 1.ハンドピース(タービン)メーカーの指示に従ってシャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
- 2.使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 3.頭部に細いもの、長いもの、大きい形状のものは折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

(使用注意)

- 1.指定の最高許容回転速度(回転数)を超えて使用しないこと。
- 2.変形、損傷(錆、表面キズ、曲がり、汚染)等のあるものは使用しないこと。
- 3.本材は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 4.本材は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

(重要な基本的注意)

研磨作業の際にはとびちりにより人体への影響を避けるため、防塵マスク等を使用すること。また、目の損傷を防ぐために保護めがねを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1.水分、直射日光及び腐食性薬剤とその蒸気の暴露をさけて、外圧(物理的負担)及び汚染を受けないように保管すること。
- 2.本材は歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【包装】

100本:紙箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 中川セラミックス株式会社

住 所 〒558-0023

大阪府大阪市住吉区山之内1丁目17番14号

電 話 番 号 06-6695-3277