


2016年 04月 07日作成 (第1版)

歯09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 JMDN70908000

デンチャーポリッシャー

【形状・構造及び原理等】

形状

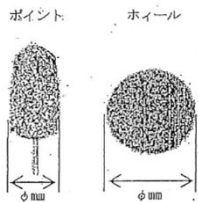

名 称	形状	砥 粒	φ
ビッグ	ポイント	シリコンカーバイド	15
ホイール 軸付	ホイール	シリコンカーバイド	24
筒	ポイント	シリコンカーバイド	15
ホイール 軸なし	ホイール	シリコンカーバイド	24
スリム	ポイント	シリコンカーバイド	13
ビッグ ハード	ポイント	シリコンカーバイド	13
柔軟性 ショート	ポイント	シリコンカーバイド	12
柔軟性 ナイス	ポイント	シリコンカーバイド	12
エコノ ミニ	ポイント	シリコンカーバイド	13
エコノ ワイド	ポイント	シリコンカーバイド	20
エコノ レッド	ポイント	シリコンカーバイド	13
ソフトブラウン	ホイール	酸化アルミニウム	24
ソフトグリーン	ホイール	シリコンカーバイド	24

公差: ±5mm

原理: 器材(ハンドピース)で回転させ補綴物等と接触させることで補綴物等を研削する。

【使用目的又は効果】

歯科技工用工物製作過程において、補綴物等を研削に用いる研削器材

【使用方法等】

(使用方法)

研削機械(ハンドピースグラインダー)にて任意の回転数で回転させた本品を被加工物表面に接触させ、対象物を研磨します。研削機械への取付には研磨ホイール用マンドレールを使用すること。

(使用方法に関する使用上の注意)

- 1.ハンドピース(タービン)メーカーの指示に従ってシャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
- 2.使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 3.頭部に細いもの、長いもの、大きい形状のものは折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- 4.レーズに装着し装着部がプラスチックで補強されているものは奥まで入れ込むと抜けづらくなりますので、とばくちで留めてください。

【使用上の注意】

(使用注意)

- 1.ハンドピースに装着するものは適正使用回転数(10,000r.p.m以下)を超えた場合には、破折して怪我をするおそれがあるので、適性使用回転数を厳守すること。
- 2.無理な角度、過度の加圧での使用は破損、破折を招くので避けること。
- 3.マンドレールを用いるものは添付の座金(二種類の内、凸の座金を上に)を確実に装着し、十分な強度のあるマンドレールを使用すること。
- 4.本材は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。

(重要な基本的注意)

研磨作業の際にはとびちりにより人体への影響を避けるため、防塵マスク等を使用すること。また、目の損傷を防ぐために保護めがねを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1.水分、直射日光及び腐食性薬剤とその蒸気の暴露をさせて、外圧(物理的負担)及び汚染を受けないように保管すること。
- 2.本材は歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【包装】

紙箱に10ヶ入で包装

型 番	入数	型 番	入 数
ビッグ	3	柔軟性 ショート	3
ホイール 軸付	6	柔軟性 ナイス	12
筒	3	エコノ ミニ	10
ホイール 軸なし	8	エコノ ワイド	8
スリム	4	エコノ レッド	10
ビッグ ハード	3	ソフトブラウン	20
		ソフトグリーン	20

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 中川セラミックス株式会社
住 所 〒558-0023
大阪府大阪市住吉区山之内1丁目17番14号
電 話 番 号 06-6695-3277