

2016年 04月 07日作成 (第1版)

歯09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

ロビンソンブラシ


【形状・構造及び原理等】

原材料

軸部:ステンレス鋼

作業部:豚毛

形状、構造

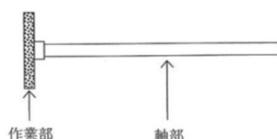

軸部の規格: JIS T5504-1

軸部形式2(φ2.35mm HP用)

軸部の長さ:スタンダード

作業部:豚毛の硬さおよび直径

名称および種類		直径(mm)	硬さ
ミニ	ソフト	10.6	軟毛
No.9	ソフト	14.2	軟毛
No.11	ソフト	17.4	軟毛

原理: 器材(レーズ)で回転させて補綴物等と接触させることで補綴物等を研削する。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研削に用いる器材で、主として、歯科技工用の補綴物の中間研削研磨に用いる。

【使用方法等】

(使用方法)

歯科用駆動装置及びハンドピース又は歯科技工用回転機器に装着し、回転させて、歯科用研磨材を塗りながら、ソフトタッチで断続的に被研削物に押し付けて研磨する。

(使用方法に関する使用上の注意)

- 1.ハンドピース(タービン)メーカーの指示に従ってシャックを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
- 2.使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 3.頭部に細いもの、長いもの、大きい形状のものは折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- 4.レーズに装着し装着部がプラスチックで補強されているものは奥まで入れ込むと抜けづらくなりますので、とばくちで留めてください。

【使用上の注意】

(使用注意)

- 1.本材は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 2.本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

(重要な基本的注意)

研磨作業の際には粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないこと。また、目の損傷を防ぐために保護めがねを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1.水分、直射日光及び腐食性薬剤とその蒸気の暴露をさけて、外圧(物理的負担)及び汚染を受けないように保管すること。
- 2.本材は歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【包装】

紙箱に12本入り包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 中川セラミックス株式会社

住 所 〒558-0023

大阪府大阪市住吉区山之内1丁目17番14号

電 話 番 号 06-6695-3277