

2018年 04月 10日作成 (第1版)


歯09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000
村上サンドペーパーコーン

【形状・構造及び原理等】

形状:コーン状(円錐形)

構造:サンドペーパー・セロファン・澱粉糊・工業用膠

エンジン用ペーパーコーンの形状

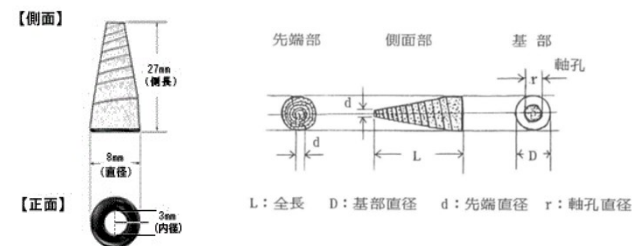

名称及び種類	砥粒メッシュ	全長 (L)	基部直径 (D)	先端直径 (d)	軸孔直径 (r)
荒目 (C)	#120	27.0	10.0	2.0	3.0
中目 (M)	#180	27.0	8.0	2.0	3.0
細目 (F)	#240	27.0	7.5	2.0	3.0
細々目 (FF)	#280	27.0	7.0	2.0	3.0
誤差の範囲	—	±1.5	±1.0	±0.5	±2.5

単位: mm

【使用目的又は効果】

本材は義歯の研削及び研磨に用いる事を目的とした、義歯の
創作工程の一環として使用する歯科用研削材料。

【使用方法等】

(使用方法)

装着可能な歯科用マンドレルに装着後、歯科用エンジンで回転
させ断続的に被研削物に押し当てて研削、研磨を行います。

(使用方法に関する使用上の注意)

- エンジン用ペーパーコーンは歯科用マンドレルに、レーズ用
ペーパーコーンは歯科用電気レーズに確実に装着すること。
- 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- マンドレルが折れ曲がったり、本材が破損する恐れがあるので、
回転数に留意し、無理な角度及び過度の加圧下での使用は避け
ること。

【使用上の注意】

(使用注意)

- 使用回転数(8,000~12,000r.p.m)
- 損傷及び変形(曲がり、汚れ等)したものは、使用しないこと。
- 本材を【使用目的、効能又は効果】に掲げた用途以外に使用しない
こと。
- 本材は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

(重要な基本的注意)

本材を使用する際には、眼や手の損傷を防ぐための保護メガネ・
保護手袋を使用すること。また、粉塵による人体への影響を避ける
ため、局所吸塵装置、防塵マスクを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

- 水分、直射日光及び腐食性薬剤とその蒸気の暴露をさせて、
外圧(物理的負担)及び汚染を受けないように保管すること。
- 本材は歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理
すること。

(有効期間)

本材の有効期間は製造日より一年間です。

【包装】

- 通常 100個入
- 徳用 500個入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 中川セラミックス株式会社
住 所 〒558-0023
大阪府大阪市住吉区山之内1丁目17番14号
電 話 番 号 06-6695-3277