

2019年 05月 21日作成 (第1版)

歯09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 JMDN70901000

## カッティングディスク

## 【形状・構造及び原理等】



原材料: 研削材(アルミナ)をフェノール樹脂で結合した薄い円盤状砥石

形状

型番	名称	直径(φmm)	厚さ(mm)
2350	カッティングディスク25	25	0.6
2351	カッティングディスク38	38	0.8

## 【使用目的又は効果】

炭化ケイ素、アルミナ等を用いる技工用研削材

## 【使用方法等】

(使用方法)

歯科用マンドレルに取り付け、歯科用電気エンジン、高速レーズなどに装着して使用する。

(使用方法に関する使用上の注意)

1. 歯科用マンドレルに確実に固定すること。
2. ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンクを確実に装着し、半チャックでないことを確認すること。
3. 予め回転させて、振れがないことを確認すること。
4. 過度の回転数(20,000回転)以下で使用する。
5. 破損、変形(錆、表面キズ、曲がり、汚染)等のあるものは使用しないこと。
6. 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
7. 目の損傷を防ぐために、保護めがねなどを使用すること。
8. 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

## 【保管方法及び有効期間等】

1. 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露をさけて、外圧(物理的負担)及び汚染を受けないように保管すること。
2. 本材は歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

## 【包装】

25枚入/箱

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 中川セラミックス株式会社

住 所 〒558-0023

大阪府大阪市住吉区山之内1丁目17番14号

電 話 番 号 06-6695-3277