

2021年 02月18日作成 (第1版)

歯09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JNDN70903000

シンエイビッグポイント


【形状・構造及び原理等】

形状、構造:ポイント状

原理:本品をハンドピースグラインダーで回転させ、物理的に接触させることで研削効果が得られる。

軸部:工具鋼

作業部:シリコンゴム、炭化ケイ素

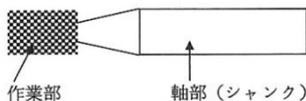

軸部の規格:JIS T 5504-1・軸部形式2(φ2.35HP)

軸部の長さ:ロング

作業部:外径及び長さ

外径:10.0mm 長さ:25.0mm

種類:ブラウン、グレー、グリーン

【使用目的又は効果】

ゴム基材で結合された様々な研磨成分からなる歯科用研磨材

【使用方法等】

(使用方法)

歯科用駆動装置及びハンドピース又は歯科技工用回転機器に装着し、回転させて、継続的に被研磨物押し付けて研磨する。

(使用方法に関する使用上の注意)

- 1.ハンドピース(タービン)メーカーの指示に従ってシャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
- 2.使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 3.頭部に細いもの、長いもの、大きい形状のものは折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

(使用注意)

- 1.指定の最高許容回転速度(回転数)を超えて使用しないこと。
- 2.変形、損傷(錆、表面キズ、曲がり、汚染)等のあるものは使用しないこと。
- 3.本材は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 4.本材は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

(重要な基本的注意)

研磨作業の際にはとびちりにより人体への影響を避けるため、防塵マスク等を使用すること。また、目の損傷を防ぐために保護めがねを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1.水分、直射日光及び腐食性薬剤とその蒸気の暴露をさけて、外圧(物理的負担)及び汚染を受けないように保管すること。
- 2.本材は歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【包装】

質量:10本入り/袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 中川セラミックス株式会社

住 所 〒558-0023

大阪府大阪市住吉区山之内1丁目17番14号

電 話 番 号 06-6695-3277