

2026年06月16日作成(第1版)

機械器具(49) 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 歯科用マンドレル JMDNコード:35170000


マンドレル

【形状・構造及び原理等】


原材料:ステンレス鋼

形状

ホワイトリ्यूブコーン・
サンドペーパーコーン用

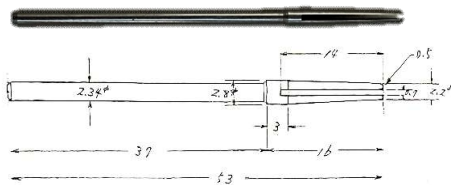

ホワイトリ्यूブコーン ミニ用

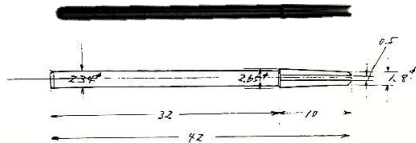

【使用目的又は効果】

回転式歯科用切断器具や研削、研磨に用いるディスク等を保持するシャフト。

【使用方法等】

(使用方法)

歯科用駆動装置及びハンドピース又は歯科技工用回転機器に装着し、回転させて、継続的に被研磨物に押し付けて研磨する為に保持するシャフト

(使用方法に関する使用上の注意)

1. 器具の正しい使用の為に、注意事項を必ず守ること。
2. 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはしないこと。
3. 使用前に研削・研磨用のホイール等を装着させ、予備回転を行い、振れないことを確認すること。
4. 目視でキズ、サビ、マクレ、変色等の有無を確認する。

【使用上の注意】

(使用注意)

1. 本研磨材は、記載の用途以外には使用しないこと。
2. 歯科技工士、歯科医師以外は使用しないこと。

(重要な基本的注意)

1. 研磨作業の際には粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないこと。
2. 研磨作業を行う際には、目の損傷を防ぐために保護めがねを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 「もらいさび」を防ぐ為、錆びている器具と一緒に取り扱いはしないこと。
2. 本材は歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【包装】

1本入/袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 中川セラミックス株式会社

住 所 〒558-0023

大阪府大阪市住吉区山之内1丁目17番14号

電 話 番 号 06-6695-3277