

※2016年11月14日改訂（第3版）


※2014年07月18日改訂（第2版）

届出許可番号：13B3X10032000102

器具機械 64 歯科用探針
一般医療機器 歯科用探針 35812000

けいそくん

【形状・構造及び原理等】（※）

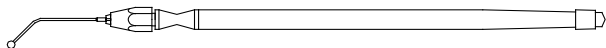

全長：152mm

ボール径：1mm、1.5mm、2mm

材質：ステンレス、真鍮（メッキ）、シリコンゴム

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】（※※）

製造販売業者・製造業者：有限会社ナビーム

住 所：〒179-0074 東京都練馬区春日町 5-33-5

電話番号：03-3970-1723

【使用目的、効能または効果】

支台歯形成で、対合歯とのクリアランスの確認に用いる。

【品目仕様等】

外観に傷や曲がり、汚れが無いこと。

【操作方法又は使用方法等】

補綴物の製作に必要な支台歯と対合歯とのクリアランスに合う寸法のボールの付いた器具の先端を、調べたい部位に挿入し、抵抗がなく通過することで、隙間が必要量以上であることを確認する。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず滅菌をすること。
2. 使用目的以外で使用しないこと。
3. 変形や異常があれば使用を中止すること。
4. 形態変更や改造はしないこと。
5. 器具は柔軟性を持たせているので取扱いは慎重にすること。
6. 洗浄、消毒、滅菌上の注意
 - ・使用後はできるだけ早く精製水、防錆洗浄剤を用いて洗浄・消毒すること。
 - ・次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポピオンヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジンは、金属腐食をおこすことがあるので使用しないこと。
 - ・アルコールを使用した高圧滅菌は、劣化の原因となるので使用しないこと。
 - ・もらい錆を防ぐために、錆びている器具と一緒に滅菌しないこと。
 - ・洗浄、消毒、滅菌後は、十分に乾燥してから保管すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

本品は、歯科従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前に破損、変形、ヒビ、腐食、チャック部に異常がないか点検する。
2. 使用前に必ず滅菌をすること。

【包装】

3本袋入り（1mm、1.5mm、2mmセット）