

医療用品 (4) 整形用品
高度管理医療機器 人工股関節大腿骨コンポーネント 35666000
 (体内固定用コンプレッションヒッププレート34003000、体内固定用ネジ16101003)

CARP-H システム

再使用禁止

【警告】

○インプラント材料を患者に使用する場合、患者に対する術後指導を十分に行うこと。
〔術後、インプラントが十分固定される前に過負荷を与えたり、骨質の弱い患者に使用するとインプラントの折損や骨破壊等が起こり、不具合発現の危険性が高まるおそれがある。〕

【禁忌・禁止】*

- 1.再使用禁止。
- 2.インプラントに損傷の認められるものは使用しないこと。
〔インプラントが正しく機能しない可能性がある。〕
- 3.感染症の患者に使用しないこと。
〔感染巣の転移や敗血症併発のおそれがある。〕
- 4.神経障害、精神障害、アルコール中毒または薬物中毒など、術後指導の徹底が困難な患者に使用しないこと。
〔医師の指導に従えず、術後管理が十分に行えないため、治療が長期化し、不具合発現の危険性が高まるおそれがある。〕
- 5.金属や異物に対して重篤なアレルギーがある患者に使用しないこと。
- 6.再滅菌は品質の低下や汚染の可能性があるため、行わないこと。
- 7.他メーカーのインプラント材料及びステンレス系インプラント材料と併用しないこと。(「相互作用」の項参照)
- 8.高齢者等には使用しないこと。
〔初期固定が十分に行えず、不具合発現の危険性が高まるおそれがある。〕

【形状・構造及び原理等】*

- 1.組成:各製品の原材料は表1をご覧ください。
- 2.形状・構造
本システムを構成する各製品の形状は以下のとおり。
本添付文書に該当する製品の製品名、サイズなどについては包装表示ラベルに記載されていますのでご確認ください。

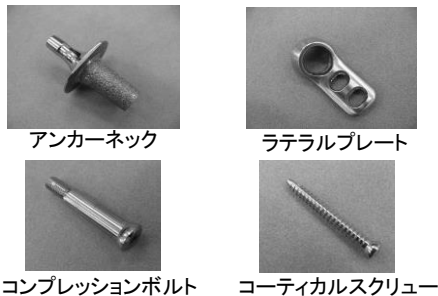


表1

製品名	原材料
アンカーネック	Ti-6Al-4V合金
ラテラルプレート	Ti-6Al-4V合金
コンプレッションボルト	Ti-6Al-4V合金 超高分子量ポリエチレン
コーティカルスクリュー	Ti-6Al-4V合金

3.原理

本品は、変形性股関節症等の患者に使用する大腿骨外側固定用内子である。大腿骨頸部をアンカーネックに置換し、当社既承認品目の骨頭を設置することで大腿骨骨頭の機能を再建する。アンカーネックの転位防止のため、大腿骨外側部からコンプレッションボルトで固定を行うが、コンプレッションボルトが大腿骨外側部に埋没しないようラテラルプレートを併用する。また、本品はアンカーネックの大腿骨埋入部にプラスト処理を施しており、プラスト処理部と骨が固定することにより大腿骨にアンカーネックが固定される。

【使用目的又は効果】

若年層で比較的骨破壊の起きていない大腿骨骨頭壊死及び変形性股関節症の患者に対する関節機能の再建のための人工股関節置換術、人工骨頭挿入術に使用する。

適応症

保存的治療又は他の手術療法ではもはや治療することが出来ない変形性関節症。
 ただし、関節骨折、又は骨壊死による重篤な関節疾患で、患者に以下の事項について説明し、同意を得た場合。
 ・人工関節置換術は常に本来の関節機能よりも劣り、術前の状態と比較して相対的に良好な状態しか得られない。
 ・人工関節は過負荷、摩耗によって弛緩し易い。
 ・人工関節の弛緩は、再置換術を必要とし、ある特定の状況下では、関節機能を回復する機会が永久に失われてしまう場合がある。
 ・人工関節置換術実施後に、患者は定期的な医学的フォローアップを受けなければならない。
 ・人工関節は負荷、作業及びスポーツがもたらす極めて過度のストレスに耐えられない。

【使用方法等】

〔準備〕

本品は滅菌済で供給されるため、開封は使用直前に行き、無菌的に取り扱うこと。

〔使用方法〕

1.大腿骨切除 大腿骨頸部を切除する。	
2.ガイド孔の開口 大腿骨外側からガイド孔を開孔する。	
3.骨切り面の形成 ボディーサイズを考慮し、骨切り面を調整する。また、このとき骨切り面がガイド孔に対して垂直になるように整える。	
4.髓空のリーミング 大腿骨髓腔内のリーミングを行う。	
5.インプラントの設置 インプラントを設置する。 骨頭は、当社既承認品を使用する。	

※当該手術に使用する器械は専用品である。

※本品の固定に際して骨セメントは使用しない。

※組合せて使用する当社既承認品の構成

- 1.販売名 人工股関節 骨頭用スリーブ
医療機器承認番号 21400BZZ00442000
組合せる構成品 スリーブ
- 2.販売名 人工股関節コバルトクロム製
医療機器承認番号 21300BZZ00465000
組合せる構成品 骨頭
- 3.販売名 人工股関節4-U
医療機器承認番号 21300BZZ00465A01
組合せる構成品 骨頭

4.販売名	人工股関節
医療機器承認番号	21100BZZ00044000
組合せる構成品	骨頭
5.販売名	ナカシマ フェモラルヘッド
医療機器承認番号	22200BZX00293000
組合せる構成品	骨頭、スリーブ

【使用上の注意】*

1.使用注意(次の患者には慎重に使用すること)

- (1)関節製品の機能に影響を与える疾患を有している患者[コンポーネントが正しく機能しない可能性があるので、慎重に使用して下さい。]
- (2)全身疾患及び代謝性障害の患者[患者の術後の日常生活に障害が出る可能性があるので、慎重に使用して下さい。]
- (3)重篤な骨粗しょう症及び骨軟化症の患者[コンポーネントの安定性が得られなくなる可能性があるので、慎重に使用して下さい。]
- (4)製品を安全に埋入する上で妨げとなる骨構造の重篤障害の患者[コンポーネントが正しく機能しない可能性があるので、慎重に使用して下さい。]
- (5)製品固着域に骨腫瘍がある患者[コンポーネントの安定性が得られなくなる可能性があるので、慎重に使用して下さい。]
- (6)骨変形症、軸位置決めの過誤、又は人工関節の埋入に妨げとなる骨状態の患者[コンポーネントが正しく機能しない可能性があるので、慎重に使用して下さい。]
- (7)過度の肥満又は体重超過の患者[コンポーネントの折損又は骨内においての安定性が得られなくなる可能性があるので、慎重に使用して下さい。]
- (8)関節製品に過負荷が予期される患者[コンポーネントが正しく機能しない可能性があり、コンポーネントの折損又は骨内においての安定性が得られなくなる可能性があるので、慎重に使用して下さい。]

2.重要な基本的注意

○本品については、試験によるMR安全性評価を実施していない。
MRI(磁気共鳴画像診断装置)検査において、温度上昇、マイグレーションやアーチファクトが発生する場合がある。

○手術を行う際は以下の条件を遵守すること。

- ・注意の行き届いた手術手技により骨折等を回避すること。
- ・製品の母床に骨折が起こった場合には、製品の固着に決定的な影響を及ぼすので、術中及び術後に適切な処置を講じること。
- ・製品の選択は、手術計画に従って骨が切除され、最終的に用意された手術用器械によって決定すること。
- ・製品装着時にハンマーでインパクトをかける際、骨折等を引き起こす可能性があるので、注意すること。
- ・種類の異なるコンポーネントと併用しないこと。
- ・摺動面に存在する不要な介在物は、人工関節の異常な摩耗原因となるので、創を閉鎖する前に除去すること。

3. 相互作用 併用禁忌・禁止(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
人工関節 (種類の異なる製品)	人工関節として正しく作動しないおそれがある。	開発コンセプトが一致していないため、正常に作動しない。
ステンレス系材料 との組合せ	人工関節として正しく作動しないおそれがある。	異種金属間で電解腐食のおそれがある。

4. 不具合・有害事象

(1)重大な不具合

- ①製品コンポーネントの移動、弛緩及び破損:製品を埋入された患者にはまれに発現することがあるので、認められた場合、直ちに適切な処置をすること。

(2)重大な有害事象

- ①二次的感染:製品の置換術中、製品による感染の危険性があるため、製品の滅菌コントロールには細心の注意を払うこと。

(3)その他の有害事象

- ①脱臼、関節屈曲角度の制約、術後における脚の長さの変化及び関節痛
- ②原発的感染
- ③神経障害、血腫、創治癒障害
- ④製品材料に対する組織反応
- ⑤関節痛及び運動制限を伴う関節周囲の石灰化
- ⑥手術中の多量出血

5.その他の注意

外装箱に貼付されている開封シールが剥がされた製品は、品質管理上の問題が生じる為、返却しないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法:高温、多湿、直射日光を避けて保管して下さい。

有効期間:包装表示ラベルに記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者
帝人ナカシマメディカル株式会社
TEL. 086-279-6278(代表)
- ・製造業者
帝人ナカシマメディカル株式会社