

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 70904000（JMDNコード）
E X クリーナー

【禁忌・禁止】

- ・本材が皮膚に付着したり、目に入らないようにしてください。
- ・本材に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないでください。

【形状、構造及び原理等】*

1. 本製品の形状、構造

本製品は、E X クリーナーホワイトと E X クリーナーブルーのセットになっており、35ml チューブのセット（チューブ（ホワイト）35 ml・チューブ（ブルー）35 ml：計 70 ml）はケースに入れ、更に遮光性のパックに入れて包装します。


5ml ボトルのセット（ボトル（ホワイト）5 ml・ボトル（ブルー）5 ml：計 10 ml）も遮光性のパックに入れて包装します。

容器はそれぞれ 5 ml ボトルと 35 ml チューブの 2 種類があります。


5 ml ボトル、35 ml チューブの中にはペースト状の研磨剤が入っており、それぞれキャップで密閉されます。

2. 外観形状・構造

【5 ml ボトル】

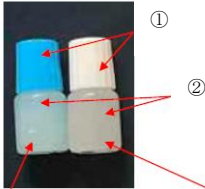

【35 ml チューブ】

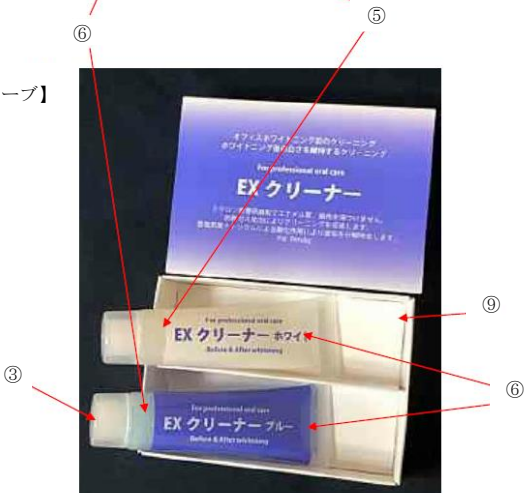

【パック】



No.	構成品	形状
①	ボトルキャップ	-
②	5ml ボトル	-
③	チューブキャップ	-
④	35ml チューブ	-
⑤	チューブ内蔵の研磨材（E X クリーナーホワイト）	ペースト
⑥	チューブ内蔵の研磨材（E X クリーナーブルー）	ペースト
⑦	パック（5ml ボトル用）	-
⑧	パック（35ml チューブ用）	-
⑨	ケース	-

2. 原材料

構成品	原材料
ボトルキャップ	合成樹脂
5ml ボトル	合成樹脂
チューブキャップ	ポリエチレン
35ml チューブ	ポリエチレン
チューブ内蔵の研磨材（E X クリーナーホワイト）	重曹、亜塩素酸ナトリウム、その他
チューブ内蔵の研磨材（E X クリーナーブルー）	クエン酸、その他
パック（5ml ボトル用）	アルミ蒸着フィルム
パック（35ml チューブ用）	アルミ蒸着フィルム
ケース	紙

血液・体液等の接触の有無：有

3. 原理

ブラッシング等の器械的作用を加えることで、本品が歯面を清掃、研磨します。

【使用目的又は効果】

本製品は、ジェル状の研磨材で、歯科衛生士、歯科医師等が予防治療ブラシ、歯磨カップ等を用いて歯面の清掃及び研磨に用います。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用方法等】

1. EXクリーナーホワイトを適量を歯科用予防治療ブラシ（ポリッシングブラシ）、研磨カップ（ラバーカップ）等に塗布して研磨します。
2. EXクリーナーブルーをEXクリーナーホワイトと同量を歯科用予防治療ブラシ（ポリッシングブラシ）、研磨カップ（ラバーカップ）等に塗布して再度研磨します。

【使用上の注意】

1. 歯科用予防治療ブラシ、研磨カップ等に適した使用回転数範囲に注意して使用してください。
2. 歯科用駆動装置及びハンドピース等については、各メーカーの指示に従い正しく使用してください。
3. 本品は乾燥すると残渣が落ちにくくなる場合があるので、使用後は速やかに水で洗浄してください。
4. 本品は使用中に成分である重曹が分解し炭酸ガスが発生しますが、性能及び品質には問題ありません。
5. 本品使用中、芳香等に嫌気を訴えた場合直ちに使用を中止してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の時は空气中浮遊粉塵、化学物質の蒸気、またはあらゆる溶液が侵入しないよう、容器の蓋を閉めて、必ず密閉状態にしてください。
2. 高温、直射日光を避け、室温・常温で保管してください。
3. 本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理してください。
4. 構成品の包装に記載の使用期限までに使用してください。（自己認証による）
5. 開封後は3か月以内に使い切ってください。（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者

名称：ナノオプテック有限会社 駒沢事業所

住所：東京都世田谷区駒沢二丁目16番2号 長谷川ビル

電話番号：090-8487-6369

取扱説明書を必ずご参照ください。