

医療用品 03 手術用手袋及び指サック  
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDNコード：70976000  
**ナガワニトリル検査・検診用手袋**


再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

再使用禁止

**【形状、構造及び原理等】**

本品はニトリルゴムを原材料とした検査・検診用の手袋である。未滅菌の使い捨てタイプである。パウダーフリー。

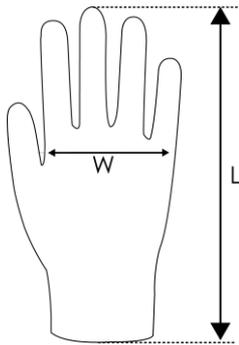

サイズ	S	M	L
全長 L (mm)	220 以上	230 以上	230 以上
掌幅 W (mm)	80±10	95±10	110±10

**【使用目的又は効果】**

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う際に、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

**【使用方法等】**

箱のミシン目を丁寧に切り取り、開封口より手袋を取り出し、手に装着して使用する。

**【使用上の注意】**

- 1) 体質によってかゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあるので、使用時に異常が認められた場合は使用しないこと。
- 2) 包装が破損、汚損しているものは使用しないこと。
- 3) 製品に破損、変形、ピンホール等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 4) 使用中に本品が破れた場合は新しいものに取り換えること。特に鋭利な器具類に触れると破れる可能性が高くなるので注意すること。
- 5) 薬品、溶剤等によっては手袋に影響を与える可能性があるため、確認の上使用すること。腐食性、強酸性、強アルカリ性等の強い化学薬品に対して長時間直接使用しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

## 1. 保管方法

高温多湿、直射日光及び水濡れを避け清潔な場所に保管すること。

## 2. 有効期間

製造後5年間 [自己認証（製造元データ）による]  
使用期限は包装箱に記載

**【包装】**

100枚/箱

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

## 〔製造販売業者〕

名称：ナガワ薬品株式会社

住所：東京都台東区東上野一丁目17番2号

第二江口ビル3階

電話番号：03-5826-4928

## 〔製造業者〕

名称：山東英科医療製品有限公司

Anhui Intco Medical Products Co., Ltd.

国名：中国