

医療用品 04 一般医療機器 コットンボール 11028000

綿球 綿球(紐付) 綿球(ガーゼ巻)

再使用禁止

【 禁忌・禁止 】

- 再使用しないでください。
- 体内に留置しないでください。
- 滅菌して使用する場合は、高圧蒸気滅菌、乾熱滅菌、EOG滅菌を使用してください。

【使用方法】

(紐付)

- 紐が切れるおそれがありますので強く引っ張らないでください。
- 紐を切り取って使用しないでください。

【 形状・構造及び原理等 】

- 本品は綿100%脱脂綿を球状に丸めたもので、表面を毛羽防止加工したもの、紐付のもの、ガーゼで巻いたものもあります。

【 使用目的又は効果 】

- 様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊です。

【 使用方法等 】

- 創傷面については滅菌したものを使用してください。

\* 【 使用上の注意 】

〈重要な基本的注意〉

- 紐付のもので 万一、紐が切れ綿球が取れなくなった場合は直ちに医師による適切な処置を受けてください

\* 【 保管方法及び有効期間等 】

〈保管方法〉

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさげ清潔な場所に保管してください。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

製造販売元：株式会社ニチエイ

TEL 072-290-3330

製造元：株式会社ニチエイ