

医 04 整形用品
一般医療機器 コットンボール 11028000

ローラーコットン

再使用禁止

【 禁忌・禁止 】

- 再使用しないでください。
- 誤飲しないようにしてください。

*【 形状・構造及び原理等 】

- 本品は、円柱状の綿繊維 100%から成る材料の表面に、カルメロースナトリウムを塗布したものです。
- サイズ S 直径約 8 mm、長さ約 25 mmの円柱
 L 直径約 10 mm、長さ約 30 mmの円柱

【 使用目的又は効果 】

- 口腔内において、唾液や血液等の吸収のために用いる。

【 使用方法等 】

- 使用目的に応じて適宜使用してください。

*【 使用上の注意 】

〈重要な基本的注意〉

- 創傷面には滅菌して使用してください。
- 滅菌して使用する場合は、高圧蒸気滅菌、EOG滅菌を使用してください。

*【 保管方法及び有効期間等 】

〈保管方法〉

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

製造販売元：株式会社ニチエイ

TEL 072-290-3330

製造元：株式会社ニチエイ