

ミラー

* **【禁忌・禁止】**

〈適用対象(患者)〉

- * 本品の原材料に対するアレルギー既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造等及び原理等】

成形した樹脂の柄とミラー部との構成品を滅菌したもの。

柄：ABS樹脂 ミラー部：ポリカーボネイトアルミ蒸着



【使用目的又は効果】

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具である。

* **【使用方法等】**

- * 鏡の反射を利用する。

* **【使用上の注意】**

〈重要な基本的注意〉

- * 1) ミラーが外れる場合があるため、誤飲しないよう注意すること。
- * 2) 再使用する場合、使用前に、洗浄、滅菌を行うこと。
- * 3) 変形するため、60℃以上の環境にしないこと。
- * 4) 変形するため、有機溶剤が接触しないこと。

* **【保管方法及び有効期間等】**

〈保管方法〉

- * ミラーにキズが入らないよう、振動や圧力を避け、清潔な場所に保管のこと。

〈有効期間〉

- * 製造後3年(未開封) 製造日はパッケージに記載

【保守・点検に係る事項】

〈消毒・滅菌〉

エチレンオキサイドガス滅菌をおこなうこと。

- * 製造元の推奨する滅菌条件

温度 45℃、湿度 30%、滅菌ガス濃度 700 mg/L、時間 4 h

〈消毒・滅菌に係る注意事項〉

煮沸消毒、及び蒸気滅菌をおこなわないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ニチエイ

住所：大阪府堺市南区原山台5丁11番2号

電話番号：072-290-3330

外国製造所：CHINA SURGICAL DRESSINGS CENTER CO., LTD.

国名：台湾