

器具器械 36 医療用ピンセット
一般医療機器 歯科治療用ピンセット 31814000

ピンセット

* 【 禁忌・禁止 】

〈適用対象(患者)〉

- * 本品の原材料に対するアレルギー既往歴のある患者には使用しないこと。

【 形状・構造等及び原理等 】

成形した樹脂の柄と鋼片との構成品を滅菌したもの。

柄：ABS樹脂 鋼片：ステンレス SUS304



【 使用目的又は効果 】

2つの先細のバネ性先端部をもつ歯科手用器具である。

* 【 使用方法等 】

- * 鋼片部で目的物を挟む。

* 【 使用上の注意 】

〈重要な基本的注意〉

- * 1) 鋼片部が鋭利になっているので、誤って肌等に突き刺さないよう注意すること。
- * 2) 再使用する場合、使用前に、洗浄、滅菌を行うこと。
- * 3) 変形するため、60℃以上の環境にしないこと。
- * 4) 変形するため、有機溶剤が接触しないこと。

* 【 保管方法及び有効期間等 】

〈保管方法〉

- * 錆を防ぐため、水ぬれ、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管のこと。

〈有効期間〉

- * 製造後3年(未開封) 製造日はパッケージに記載

【 保守・点検に係る事項 】

〈消毒・滅菌〉

エチレンオキシドガス滅菌をおこなうこと。

- * 製造元の推奨する滅菌条件

温度 45℃、湿度 30%、滅菌ガス濃度 700 mg/L、時間 4 h

〈消毒・滅菌に係る注意事項〉

煮沸消毒、及び蒸気滅菌をおこなわないこと。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

製造販売元：株式会社ニチエイ

住所：大阪府堺市南区原山台5丁11番2号

電話番号：072-290-3330

外国製造所：CHINA SURGICAL DRESSINGS CENTER CO., LTD.

国名：台湾