

## エキスプローラー

### \* **【禁忌・禁止】**

〈適用対象(患者)〉

- \* 本品の原材料に対するアレルギー既往歴のある患者には使用しないこと。

### 【形状・構造等及び原理等】

成形した樹脂の柄と鋼片との構成品を滅菌したもの。

柄：ABS樹脂 鋼片：ステンレス SUS304



### 【使用目的又は効果】

歯科診療で触診等に用いる手持型の器具(プローブ)である。

### \* **【使用方法等】**

- \* 鋼片部で触診を行う。

### \* **【使用上の注意】**

〈重要な基本的注意〉

- \* 1) 鋼片部が鋭利になっているので、誤って肌等に突き刺さないように注意すること。
- \* 2) 再使用する場合、使用前に、洗浄、滅菌を行うこと。
- \* 3) 変形するため、60℃以上の環境にしないこと。
- \* 4) 変形するため、有機溶剤が接触しないこと。

### \* **【保管方法及び有効期間等】**

〈保管方法〉

- \* 錆を防ぐため、水ぬれ、及び高温・多湿をさげ清潔な場所に保管のこと。

〈有効期間〉

- \* 製造後3年(未開封) 製造日はパッケージに記載

### 【保守・点検に係る事項】

〈消毒・滅菌〉

エチレンオキシドガス滅菌をおこなうこと。

- \* 製造元の推奨する滅菌条件

温度 45℃、湿度 30%、滅菌ガス濃度 700 mg/L、時間 4h

〈消毒・滅菌に係る注意事項〉

煮沸消毒、及び蒸気滅菌をおこなわないこと。

### 【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ニチエイ

住所：大阪府堺市南区原山台5丁11番2号

電話番号：072-290-3330

外国製造所：CHINA SURGICAL DRESSINGS CENTER CO., LTD.

国名：台湾